

Akku-Druckknopf

## Montageanleitung



Mit dem Akku-Druckknopf wird die Entnahme der Akkus Deines ergoflix® LX oder ergoflix® LXplus Modells ganz leicht. Kurz auf den Push-Button drücken und schon kannst Du die Akkus bequem entnehmen. In diesem Guide erklären wir Dir Schritt für Schritt, wie Du den Akku-Druckknopf anbringst. Gut zu wissen: Für die Montage benötigst Du kein Werkzeug.

**Hinweise:** Achte bitte bei den folgenden Schritten darauf, dass die einzelnen Komponenten nicht in die Fassung des Akkus fallen. Bitte gehe behutsam mit den Einzelteilen um.

## Und so geht's:

Entferne zunächst den Akku aus der Akkufassung (s. Abbildung 1 und 2).



Abbildung 1: Drücken des Akkuclips



Abbildung 2: Herausnehmen des Akkus

Führe nun den Druckknopf in die Fassung ein, sodass dieser an der innenliegenden Seite der runden Aussparung liegt (s. Abbildung 3 und 4).



Abbildung 3: Einführen des Druckknopfs



Abbildung 4: Einlegen des Druckknopfs

Setze anschließend die Halterung von außen auf den Druckknopf und lasse diese spürbar einrasten (s. Abbildung 5 und 6).



Abbildung 5: Aufsetzen der Halterung



Abbildung 6: Eingerasteter Druckknopf

Drehe nun den Druckknopf, wenn notwendig so, dass die Markierung parallel zur Akkufassung nach oben weist (s. Abbildung 4).



Abbildung 7: Drehen des Druckknopfs



Abbildung 8: Fertig montierter Druckknopf

Führe den Akku nun wieder in die Akkufassung ein. Geschafft: Der Akku-Druckknopf ist montiert. Führe die vorherigen Schritte auch für den übrigen Akku durch.



Abbildung 9: Akku einführen



Abbildung 10: Eingerasteter Akku mit Druckknopf

## **ergoflix Group GmbH**

Marktstr. 20  
46499 Hamminkeln

Fon 02852 94590-00

Fax 02852 94590-99

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

Besuche uns auf Social Media:



### **Öffnungszeiten**

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

**Stand:** Januar 2023

**Rechtliches:** Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle Artikel ohne Deko. Die ergoflix Group GmbH ist Importeur gemäß des Medizinproduktegesetzes.