




## Checkliste: ergoflix-Akkus im Winter lagern

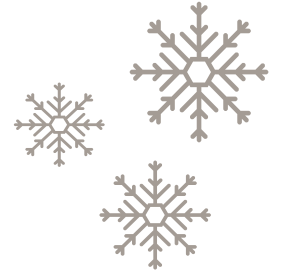

- Entfernen Sie die Akkus aus dem Elektrorollstuhl.
- Trennen Sie die Akkus vom Ladegerät.
- Prüfen Sie den Ladestand der ergoflix-Akkus. (Ein Ladelevel zwischen 40 und 60 % ist ideal.)

### Gut zu wissen:

Die ergoflix-Akkus verfügen über eine Entladeschutzschaltung. Das bedeutet, dass das Ladelevel bewahrt wird. Diese Schaltung schützt jedoch nicht vor Selbstentladung bzw. Tiefentladung. Um das Ladelevel der ergoflix-Akkus zu überprüfen, drücken Sie auf die Taste über der Ladestandsanzeige der Akkus. Der Ladezustand wird durch fünf leuchtende LEDs angezeigt. Leuchten bei Ihnen zwischen 2 und 3 Leuchten auf, so befindet sich der Lithium-Ionen-Akku von ergoflix in einem optimalen Zustand für eine Lagerung.



Ladestands-  
anzeige am  
ergoflix-Akku

- Um Batterien aufzubewahren, ist eine Temperatur von 20° C ideal.
- Lithium-Ionen-Akkus fühlen sich an einem trockenen, frostfreien Ort wohl.



## Ihre Notizen:

---

---

---

### Öffnungszeiten: