

ergoflix

Teleskoprampen • Rampes télescopique

Montageanleitung • Guide de montage



ergoflix.de | ergoflix.fr

Die ergoflix Teleskoprampen sind aus robustem Aluminium gefertigt und lassen sich problemlos aus- und wieder einschieben. Durch ihr geringes Gewicht lassen sich die Schienen leicht handhaben und können zusammengeschooben kompakt verstaut werden. Die Rampen verfügen über eine rutschfeste und strukturierte Oberfläche und gewährleisten dadurch einen festen Halt.



Abmessungen und Gewichte

| Abmessungen (ca.) | Geschlossen | Geöffnet |
|-------------------|-------------|----------|
| Länge | 910 mm | 1520 mm |
| Breite | 190 mm | 190 mm |
| Höhe | 50 mm | 50 mm |
| Gewicht | Einzeln | Zusammen |
| Kilogramm | 3,9 kg | 7,8 kg |
| Tragkraft | Zusammen | |
| Kilogramm | 300 kg | |

Inbetriebnahme der Rampen



WARNUNG Verletzungsgefahr bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Beim Verladen des Rollstuhls können Gefährdungen durch Kippen und Stürzen des Gerätes auftreten. Um dies zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Hinweise:

- Überschreite niemals die maximale Traglast Deiner Rampen.

- Verlade den Rollstuhl nur mit Hilfe der Rampen, wenn Du das Gerät sicher beherrschst.
- Sei bitte beim Be- und Entladen des Rollstuhls stets vorsichtig.
- Stelle Dich niemals in den Weg von Geräten oder Fahrzeugen und achte bitte auf andere Personen und Kinder in unmittelbarer Umgebung.
- Bitte lass angebrachte Rampen nicht unbeaufsichtigt.
- Lade und entlade nur auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Die Rampenoberflächen und – unterkanten haben bei Nässe weniger Haftung. Bitte sei dann besonders aufmerksam und vorsichtig.
- Verwende die Rampen nur für den dafür vorgesehenen Zweck.

Bitte beachte beim Verladen folgende Punkte:

1. Parke den PKW oder den Kleintransporter vor dem Verladen auf festem Untergrund und sichere das Fahrzeug gegen Fortrollen.
2. Lege die Rampen rutschsicher auf den Untergrund auf.
3. Stelle sicher, dass die Rampen sauber und unbeschädigt sind.
4. Stelle sicher, dass die Rampe deutlich breiter ist als der Rollstuhl.
5. Stelle den Rollstuhl mit dem Vorderrad nach vorne in Richtung der Rampe. Rolle oder fahre den Rollstuhl langsam und gleichmäßig die Rampe hinauf, und achte darauf, dass die Räder der Mitte der Rampe folgen.
6. Befahre die Rampe mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit.
7. Befahre die Rampe ohne Unterbrechung, um ein Zurückrollen zu verhindern.
8. Achte bitte auf einen ausreichend großen Leerlauf-Bereich, damit der Rollstuhl bei Unterbrechung der Fahrt ein kurzes Stück abwärtsrollen kann.

Instandhaltung

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Laderampe und die Komponenten vor jedem Gebrauch zu überprüfen.

Wenn die Rampe beschädigt ist, sollte sie nicht verwendet werden.

Die Rampe sollte durch regelmäßige Reinigung gewartet werden.

Les rampes télescopiques ergoflix sont fabriquées en aluminium robuste et se déplient et se replient facilement. Grâce à leur faible poids, les rampes sont faciles à manipuler et peuvent être rangées de manière compacte une fois repliées. Les rampes sont dotées d'une surface antidérapante et texturée, ce qui garantit une bonne prise en main.



Dimensions et poids

| Dimensions (environs) | Fermée | Ouverte |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Longueur | 910 mm | 1520 mm |
| Largeur | 190 mm | 190 mm |
| Hauteur | 50 mm | 50 mm |
| Poids | Une rampe | Les deux rampes |
| En kilogramme | 3,9 kg | 7,8 kg |
| Capacité de charge | Les deux rampes | |
| En kilogramme | 300 kg | |

Mise en service des rampes



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu

Le chargement du fauteuil roulant non conforme peut présenter des risques de basculement et de chute de l'appareil. Pour éviter cela, respectez les consignes suivantes :

- Ne dépassez jamais la charge maximale de vos rampes.

- Ne chargez le fauteuil roulant à l'aide des rampes que si vous maîtrisez parfaitement l'appareil.
- Soyez toujours prudent lors du chargement et du déchargement du fauteuil roulant.
- Ne vous placez jamais sur le chemin d'un appareil ou d'un véhicule. Faites attention aux autres personnes et aux enfants dans l'environnement immédiat.
- Ne laissez pas les rampes d'accès sans surveillance.
- Ne chargez et ne déchargez que sur une surface stable et plate.
- Les surfaces et les bords inférieurs des rampes ont moins d'adhérence lorsqu'ils sont mouillés.
- Soyez particulièrement attentif et prudent.
- N'utilisez les rampes que pour l'usage auquel elles sont destinées.

Respectez les points suivants lors du chargement :

1. Garez la voiture ou la camionnette sur une surface solide avant de la charger, et bloquez le véhicule pour l'empêcher de rouler.
2. Posez les rampes sur le sol de manière à ce qu'elles ne glissent pas.
3. Assurez-vous que les rampes sont propres et non endommagées.
4. Assurez-vous que la rampe est nettement plus large que le fauteuil roulant.
5. Placez le fauteuil roulant avec la roue avant vers l'avant en direction de la rampe. Poussez ou conduisez le fauteuil roulant (à l'aide du moteur électrique) lentement et régulièrement sur la rampe, en veillant à ce que les roues suivent le milieu de la rampe.
6. Montez la rampe à la vitesse la plus basse possible.
7. Montez la rampe sans vous arrêter pour éviter de reculer.
8. Faites en sorte d'avoir une zone de marche à vide suffisamment grande pour que le fauteuil roulant puisse, en cas d'accident, se déplacer sur une courte distance. La rampe doit pouvoir rouler vers le bas sur une courte distance en cas d'interruption de la course.

Maintenance

Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'inspecter la rampe de chargement et ses composants avant chaque utilisation.

Si la rampe est endommagée, elle ne doit pas être utilisée.

Vous pouvez entretenir la rampe en la nettoyant régulièrement.

Deine Notizen/vos notes:

A series of horizontal dotted lines for writing notes, starting below the header and extending to the bottom of the page.

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon 02852 94590-00
Fax 02852 94590-99
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France SAS

35 rue Saint Simon
69009 Lyon

Tél. +33 (0)4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

Besuche uns auf Social Media:



Öffnungszeiten

März bis November:
montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr
Dezember bis Februar:
montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture:

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Stand: Januar 2023 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.
Version: 002 decembre 2022 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés. Toutes les dimensions indiquées sont des valeurs approximatives.

Hersteller/Fabricant:

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou
Anhui Province, Anhui,
239400 CHINA



SUNGO Europe B. V.
Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands