

Joystickaufsatz • embout de joystick

Montageanleitung • Instructions de montage



Vous pouvez choisir l'embout de votre joystick, selon vos besoins. Cela vous offre encore plus de confort pour diriger et conduire votre fauteuil roulant électrique pliable ergoflix.

À cette fin, nous vous proposons deux embouts supplémentaires en plus de l'embout de joystick standard :

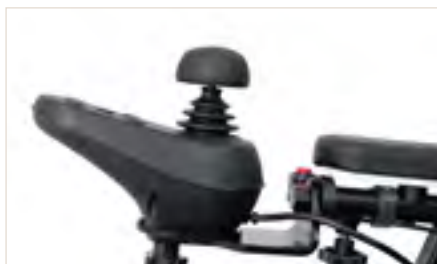


Figure 1: Embout de joystick Confort

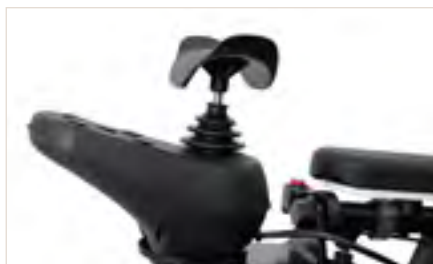


Figure 2: Embout de joystick Tetra

Bon à savoir:

Vous n'avez besoin d'aucun outil pour le montage.

Voici les étapes pour le montage :

D'abord, saisissez la partie supérieure de l'embout standard sur le module de commande de votre fauteuil roulant ergoflix et tirez-le vers le haut (voir Fig. 3). Vous pouvez ensuite installer le nouvel embout : prenez le nouvel embout de joystick et alignez l'ouverture située en dessous avec la goupille du joystick (voir Fig. 4). Fixez maintenant le nouvel embout, en appuyant fermement le nouvel embout vers le bas sur la goupille (voir Fig. 5).

Enfin, assurez-vous que le nouvel embout est bien fixé et correctement en place.



Figure 3 : Retrait de l'embout standard du joystick



Figure 4 : Placement du nouvel embout sur la goupille métallique



Figure 5 : Placement du nouvel embout sur la goupille métallique

Votre nouvel embout de joystick, conçu pour améliorer le confort lors de la direction et de la conduite, est maintenant prêt à l'emploi.

Du kannst den Aufsatz Deines Joysticks nach Deinen Wünschen anpassen. So erhältst Du einen noch höheren Komfort beim Lenken und Fahren Deines ergoflix.

Hierfür bieten wir Dir neben dem Standard-Joystickaufsatz zwei weitere Aufsätze:



Abbildung 1: Joystickaufsatz Komfortknauf



Abbildung 2: Joystickaufsatz Tetragabel

Gut zu wissen:

Für die Montage benötigst Du kein Werkzeug.

Und so geht's:

Greife den obersten Ring des Joysticks am Bedienmodul Deines Rollstuhls von ergoflix und ziehe diesen nach oben ab (s. Abb. 3). Nimm nun den neuen Joystickaufsatz und platziere diesen mit der Öffnung, die sich unterhalb des Aufsatzes befindet auf dem Pin des Joysticks des Bedienmoduls (s. Abb. 4). Drücke nun den neuen Aufsatz nach unten auf den Pin fest (s. Abb. 5). Prüfe zuletzt, ob der neue Aufsatz fest und richtig sitzt.



Abbildung 3: Abziehen des Standard-Joystickaufsatzes



Abbildung 4: Aufsetzen des neuen Aufsatzes auf dem Metallstift



Abbildung 5: Festdrücken des neuen Joystickaufsatzes

Dein neuer Joystickaufsatz für mehr Komfort beim Lenken und Fahren ist nun einsatzbereit.

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000
Fax +49 (0) 2852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France SAS

6 rue d'Arsonval
Batiment B3
69680 Chassieu

Tél. +33 (0)4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

Besuche uns auf Social Media



Telefonische Servicezeiten

März bis November:
montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr
Dezember bis Februar:
montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Stand: August 2024 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.
Version: juillet 2024 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés. Toutes les dimensions indiquées sont des valeurs approximatives.

Hersteller/Fabricant:

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou
Anhui Province, Anhui,
239400 CHINA



SUNGO Europe B. V.
Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands