

ergoflix

Betriebsanleitung

Teleskopprampen



ergoflix.de

Die ergoflix Teleskoprampen sind aus robustem Aluminium gefertigt und lassen sich problemlos aus- und wieder einschieben. Durch ihr geringes Gewicht lassen sich die Schienen leicht handhaben und können zusammengeschoben kompakt verstaut werden. Die Rampen verfügen über eine rutschfeste und strukturierte Oberfläche und gewährleisten dadurch einen festen Halt.



Abmessungen und Gewichte

| Abmessungen (ca.) | Geschlossen | Geöffnet |
|-------------------|-------------|----------|
| Länge | 910 mm | 1520 mm |
| Breite | 190 mm | 190 mm |
| Höhe | 50 mm | 50 mm |
| Gewicht | Einzel | Zusammen |
| Kilogramm | 3,9 kg | 7,8 kg |
| Tragkraft | Zusammen | |
| Kilogramm | 300 kg | |

Inbetriebnahme der Rampen



WARNUNG Verletzungsgefahr bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Beim Verladen des Rollstuhls können Gefährdungen durch Kippen und Stürzen des Gerätes auftreten. Um dies zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast Ihrer Rampen.
- Verladen Sie den Rollstuhl nur mit Hilfe der Rampen, wenn Sie das Gerät sicher beherrschen.

- Seien Sie beim Be- und Entladen des Rollstuhls stets vorsichtig.
- Stellen Sie sich niemals in den Weg von Geräten oder Fahrzeugen. Achten Sie auf andere Personen und Kinder in unmittelbarer Umgebung.
- Lassen Sie angebrachte Rampen nicht unbeaufsichtigt.
- Laden und entladen Sie nur auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Die Rampenoberflächen und – unterkanten haben bei Nässe weniger Haftung. Bitte seien Sie besonders aufmerksam und vorsichtig.
- Verwenden Sie die Rampen nur für den dafür vorgesehenen Zweck.

Beachten Sie beim Verladen folgende Punkte:

1. Parken Sie den PKW oder den Kleintransporter vor dem Verladen auf festem Untergrund und sichern Sie das Fahrzeug gegen Fortrollen.
2. Legen Sie die Rampen rutschsicher auf den Untergrund auf.
3. Stellen Sie sicher, dass die Rampen sauber und unbeschädigt sind..
4. Stellen Sie sicher, dass die Rampe deutlich breiter ist als der Rollstuhl.
5. Stellen Sie den Rollstuhl mit dem Vorderrad nach vorne in Richtung der Rampe. Rollen oder fahren Sie den Rollstuhl langsam und gleichmäßig die Rampe hinauf, und achten Sie darauf, dass die Räder der Mitte der Rampe folgen.
6. Befahren Sie die Rampe mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit.
7. Befahren Sie die Rampe ohne Unterbrechung, um ein Zurückrollen zu verhindern.
8. Achten Sie auf einen ausreichend großen Leerlauf-Bereich, damit der Rollstuhl bei Unterbrechung der Fahrt ein kurzes Stück abwärtsrollen kann.



HINWEIS

Empfindliche Bauteile

Achten Sie bei dem ergoflix M darauf, dass die Übersturz-Rollen beim Verladen auf den Rampen aufsetzen können.

Instandhaltung

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Laderampe und die Komponenten vor jedem Gebrauch zu überprüfen.

Wenn die Rampe beschädigt ist, sollte sie nicht verwendet werden.

Warten Sie die Rampe durch regelmäßige Reinigung.

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20, 46499 Hamminkeln

Fon 0 28 52 9 45 90-00

Fax 0 28 52 9 45 90-99

info@ergoflix.de, www.ergoflix.de

Öffnungszeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 und 17:00 Uhr

Stand: April 2022 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.

Hersteller:

Ningbo Fangzhong Machinery CO.,LTD
3rd Fl. #3 Building, NO.568 Siming East Road, Yinzhou District, Ningbo,Zhejiang,China



SUNGO Europe B.V., Olympisch Stadion 24
1076DE Amsterdam, Netherlands