

## Höhenverstellung der Armlehnen

### Montageanleitung



Die Höhenverstellung für die Armlehnen Deines Elektrorollstuhls optimiert Deine Sitzposition und entlastet Deinen Schulter- sowie Nackenbereich. Du hast die Wahl zwischen zwei Höhen: 33 mm oder 43 mm.

**Gut zu wissen:** Das Set besteht aus zwei Höhenverstellungen (je eine für die linke und eine für die rechte Armlehne) und kann ganz leicht selbst montiert werden. Dafür benötigst Du einen Inbusschlüssel in der Größe 3.

## Und so geht's:

Beginne zunächst mit der Armlehne ohne Bedienmodul. Hier fällt die Montage leichter. Löse zuerst die Schrauben des Polsters unterhalb der Armlehne mit dem Inbusschlüssel und verwahre die Schrauben (s. Abb. 1). Entferne nun vorsichtig die Armlehne von der Strebe (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Lösen der Schrauben



Abbildung 2: Entnehmen des Polsters

Tausche die vormontierten Abstandshalter gegen die gewünschte Größe aus (s. Abb.3) und montiere die Armlehne mithilfe der beigelegten Schrauben (s. Abb.4).



Abbildung 3: Montieren des Polsters



Abbildung 4: Festdrehen der Schrauben

Nun ist eine Armlehne fertig montiert (s. Abb. 5). Um die Höhenverstellung an der Armlehne mit Bedienmodul vorzunehmen, demontiere zunächst das Bedienmodul und dann die Armlehne (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Fertig montierte Armlehne



Abbildung 6: Entnehmen des Polsters

Um das Bedienmodul ebenfalls in der Höhe verstellen zu können, wird der beigelegte Adapter an der Armlehne montiert (s. Abb. 7). Daraufhin wird die Armlehne wie an der anderen Seite wieder befestigt (s. Abb. 8).



Abbildung 7: Montierter Adapter



Abbildung 8: Befestigen der Armlehne

Nun kann das Bedienmodul in die obere Öffnung eingesetzt und mit der Feststellschraube an der Seite fixiert werden (s. Abb. 9).



Abbildung 9: Fixieren des Bedienmoduls



Abbildung 10: Fertig montierte Höhenverstellung

## **ergoflix Group GmbH**

Marktstr. 20  
46499 Hamminkeln

Fon 02852 94590-00  
Fax 02852 94590-99  
info@ergoflix.de  
www.ergoflix.de

Besuche uns auf Social Media



### **Telefonische Servicezeiten**

März bis November:  
montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr  
Dezember bis Februar:  
montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Stand: August 2023 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.

#### **Hersteller/Fabricant:**

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.  
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou  
Anhui Province, Anhui,  
239400 CHINA



SUNGO Europe B. V.  
Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA  
Capelle aan den IJssel, The Netherlands