

Montageanleitung

Rollstuhlanhänger

Guide de montage

Remorque pour fauteuil roulant



Mithilfe des Rollstuhl-Anhängers kannst Du bequem Deinen Einkauf transportieren. Erfahre in dieser Anleitung, wie das geht!

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage kein Werkzeug.

Und so geht's

Drücke auf den schwarzen Druckknopf an dem silbernen Bolzen (s. Abb. 1) und ziehe diesen so weit wie möglich, jedoch nicht vollständig, aus der Öffnung heraus. Wiederhole den Schritt auf der anderen Seite, sodass sich die beiden Druckknöpfe berühren (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Druckknopf am Bolzen



Abbildung 2: Herausgezogene Bolzen

Greife zunächst, bei Bedarf, um den Kabelbaum und drehe den Stoff leicht nach oben, um das Anbringen des Anhängers zu erleichtern (s. Abb. 3). Lege den Anhänger an den Rollstuhlrahmen an, direkt zwischen die beiden Rohröffnungen (1-2) (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Drehen der Kabel



Abbildung 4: Anlegen des Anhängers

Bei der Montage des Anhängers besteht Quetschgefahr, achte auf eine vorsichtige Arbeitsweise.

Achte darauf, dass die Öffnungen des Anhängers direkt an den Rohren des Rollstuhls liegen (3-4) (s. Abb. 5). Falls dies nicht genau passt, kannst Du die Kabel am Rollstuhl noch etwas weiter nach oben oder unten drehen. Drücke den Druckknopf und schiebe den silbernen Bolzen in die Rohröffnung am Rollstuhl (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Position der Rohröffnungen



Abbildung 6: Einschieben der Bolzen

Der silberne Bolzen muss vollends in das Rohr gedrückt werden (s. Abb. 7), wiederhole dies auf der anderen Seite. Der Rollstuhl-Anhänger ist fertig montiert und kann beladen werden (s. Abb. 8).



Abbildung 7: Endposition des Bolzens



Abbildung 8: Fertig montierter Rollstuhl-Anhänger mit Getränkekiste

Bitte beachte, dass beim Rollstuhl-Anhänger das maximale Zuladungsgewicht 30 kg beträgt. Durch den Anhänger ist der Wendekreis des Rollstuhls vergrößert und Du benötigst eine umsichtigere Fahrweise. Zuladungen sollten sicher angebracht und ggf. zusätzlich durch einen (Fahrrad-)Spanngurt gesichert werden, damit bei der Fahrt nichts herausfallen kann.

Grâce à la remorque pour fauteuil roulant, vous pouvez transporter vos courses en toute simplicité. Dans ce manuel, vous découvrirez étape par étape comment l'utiliser.

Bon à savoir : aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

Voici les étapes pour le montage :

Appuyez sur le bouton-poussoir noir situé sur la goupille argentée (voir fig. 1), puis tirez-la le plus possible sans la retirer complètement du tube. Répétez la même opération de l'autre côté, jusqu'à ce que les deux boutons-poussoirs se rejoignent (voir fig. 2).



Figure 1 : Bouton-poussoir sur la goupille



Figure 2 : Goupilles tirées vers l'extérieur

Saisissez d'abord le faisceau de câbles si nécessaire et relevez légèrement le tissu afin de faciliter la fixation de la remorque (voir fig. 3). Placez ensuite la remorque contre le cadre du fauteuil roulant, directement entre les deux ouvertures des tubes (**1-2**) (voir fig. 4).



Figure 3 : Rotation du faisceau de câbles



Figure 4 : Positionnement de la remorque

Lors du montage de la remorque, il existe un risque de pincement. Veuillez donc à travailler avec prudence.

Assurez-vous que les tubes de la remorque soient bien alignés avec ceux du fauteuil roulant (3-4) (voir fig. 5). Si l'ajustement n'est pas exact, vous pouvez faire pivoter les câbles du fauteuil roulant légèrement vers le haut ou vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton-poussoir et insérez la goupille argentée dans le tube du fauteuil roulant (voir fig. 6).



Figure 5 : Position des tubes



Figure 6 : Insertion des goupilles

La goupille argentée doit être complètement enfoncée dans le tube (voir fig. 7). Répétez la même opération de l'autre côté. La remorque pour fauteuil roulant est maintenant entièrement montée et peut être chargée (voir fig. 8).

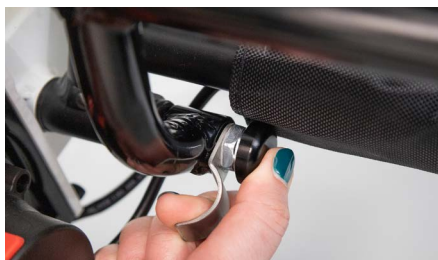


Figure 7 : Position finale de la goupille



Figure 8 : Remorque pour fauteuil roulant entièrement montée avec une caisse de boissons

Veuillez noter que la charge maximale autorisée pour la remorque de fauteuil roulant est de 30kg. L'utilisation de la remorque augmente le rayon de braquage du fauteuil roulant et nécessite donc une conduite plus prudente. Assurez-vous que le chargement soit correctement fixé et, si nécessaire, sécurisez-le en plus à l'aide d'une sangle de serrage (type sangle de vélo), afin d'éviter toute chute pendant le déplacement.

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand 

Telefonische Servicezeiten
März bis November:
montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr
Dezember bis Februar:
montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00076



202604-10