

Montageanleitung

Schwenkarm für Bedienmodul

Guide de montage

Pantographe



Den Schwenkarm für Dein Bedienmodul kannst Du zur Seite bewegen und so näher an Tische oder Sanitäreinrichtungen heranfahren. Das ermöglicht Dir noch mehr Flexibilität.

Gut zu wissen: Der Schwenkarm ist einfach und für jedes Modell nachrüstbar.

Und so geht's:

Entferne zunächst das vorhandene Bedienmodul, indem Du das Rädchen am Kabel lockerst und die Stecker auseinanderziehst (s. Abb. 1). Löse die Feststellschraube, um das Bedienmodul zu entfernen (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Trennen des Kabels



Abbildung 2: Entfernen des Bedienmoduls

Löse auch an der Unterseite des Bedienmoduls die Feststellschraube (s. Abb. 3), um das Bedienmodul von der Gabel zu trennen (s. Abb. 4) und bewahre die Schraube auf.



Abbildung 3: Lösen der Feststellschraube



Abbildung 4: Abtrennen der Gabel

Bei älteren Bedienmodulen (ausgenommen ergoflix® LX in Weiß und Rot und neue Mi2 Variante) ist eine Adapterplatte notwendig, um das Zubehör korrekt verwenden zu können. Du benötigst einen Kreuzschraubendreher PH2, um die Schritte vor der finalen Montage anzuwenden. Ansonsten kannst Du bei der **Abbildung 11** fortfahren.

Entferne bei älteren Modulen die vorhandene Gabel vom Bedienmodul (s. Abb. 5). Nimm die Adapterplatte zur Hand und setze die einzelne dickere Schraube in das Loch (s. Abb. 6). Diese muss vollständig eingesetzt werden (s. Abb. 7).



Abbildung 5: Abgetrennte Gabel



Abbildung 6: Einsetzen der Schraube

Drehe die Adapterplatte um, damit das Schraubenende nach oben gerichtet ist. Nun kann die Platte auf der Unterseite des Bedienmoduls aufgelegt werden (s. Abb. 8). Achte darauf, diese mit der Schraube nach vorne auszurichten. Durch die verschiedenen Löcher in der Platte kannst Du die Position des Bedienmoduls ganz bequem an Dich anpassen.



Abbildung 7: Platte mit eingesetzter Schraube



Abbildung 8: Auflegen der Platte

Setze die übrigen Schrauben ein und drehe diese per Hand fest. Ziehe die Schrauben danach noch mit einem Kreuzschraubendreher an (s. Abb. 9). Die Adapterplatte ist fertig montiert (s. Abb. 10). Fahre nun mit der weiteren Anleitung fort.



Abbildung 9: Festdrehen der Platte



Abbildung 10: Fertig montierte Adapterplatte

Platziere das Bedienmodul nun auf der Gabel des Schwenkarms (s. Abb. 11) und drehe es mit der Feststellschraube fest. Anschließend kann das Bedienmodul wieder in die Öffnung eingesetzt und mit einer weiteren Feststellschraube befestigt werden (s. Abb. 12).



Abbildung 11: Platzieren des Bedienmoduls



Abbildung 12: Einsetzen des Bedienmoduls

Um das Bedienmodul wieder anzuschließen, verbinde die beiden Stecker mit der Pfeilmarkierung zueinander und drehe anschließend am Rädchen (s. Abb. 13).



Abbildung 13: Verbinden des Kabels



Abbildung 14: Fertig montierter Schwenkarm

Das Bedienmodul kann nun abgeschwenkt werden. Greife dazu unter das Bedienmodul und bewege es nach außen (s. Abb. 15).



Abbildung 15: Abschwenden des Bedienmoduls



Abbildung 16: Endposition des Schwenkarms

Vous pouvez déplacer le bras pivotant du module de commande sur le côté et le rapprocher ainsi des tables ou des installations sanitaires. Cela vous donne encore plus de flexibilité.

Bon à savoir: Le bras pivotant peut être facilement installé ultérieurement.

Voici les étapes pour le montage:

Déconnectez le câble du module de commande en tournant la molette et en la tirant (voir figure 1). Vous pouvez ensuite desserrer la vis de blocage et retirer le module de commande de son support (voir figure 2).



Figure 1: Séparation du câble



Figure 2: Desserrage la vis de blocage

Dévisser les vis de la fourche à l'aide d'un tournevis cruciforme (voir figure 3) et conservez la fourche démontée (voir figure 4).



Figure 3: Desserrage des vis



Figure 4: Fourche détachée

Prenez maintenant la plaque d'adaptation et insérez la vis unique plus épaisse dans le trou (voir figure 5). Celle-ci doit être complètement insérée (voir figure 6).

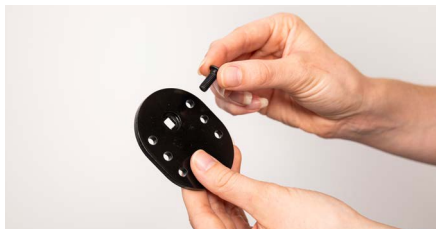


Figure 5: Mise en place de la vis



Figure 6: Plaque avec vis en place

La plaque d'adaptation peut maintenant être posée sur la face inférieure du module de commande (voir figure 7). Veillez à l'orienter avec la vis vers l'avant. Les différents trous de la plaque vous permettent d'adapter facilement la position du module de commande à vos besoins. Insérez les autres vis et vissez-les à la main. Serrez ensuite les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (voir figure 8).



Figure 7: Mise en place de la plaque d'adaptation sous le module de commande



Figure 8: Serrage de la plaque

Le montage de la plaque d'adaptation est terminé (voir figure 9). Placez le module de commande sur la base de fixation du bras pivotant (voir figure 10) et fixez-le avec la vis de serrage.



Figure 9: Plaque d'adaptation montée



Figure 10: Placement du module de commande sur la base de fixation

Le module de commande peut ensuite être remis en place, dans l'ouverture et le fixer avec une autre vis de blocage (voir figure 11). Pour reconnecter le module de commande, reliez les deux connecteurs l'un à l'autre en respectant le sens de la flèche, puis tournez la molette (voir figure 12).



Figure 11: Mise en place du module de commande



Figure 12: Connexion du câble

Le module de commande peut maintenant être tourné. Pour ce faire, placez votre main sous le module de commande et faites-le glisser vers l'extérieur (voir figure. 14).



Figure 13: Bras pivotant assemblé



Figure 14: Pivotement du module de commande

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00024



202606-05