

Montageanleitung

Flaschenhalter

Guide de montage

Porte-bouteille



Der Flaschenhalter wird am Rahmengestell befestigt und bietet Dir Platz für Dein Lieblingsgetränk. Durch die Einstellungsmöglichkeiten kannst Du Flaschen unterschiedlicher Größe in den Flaschenhalter einsetzen.

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage den mitgelieferten Inbusschlüssel.

Empfohlene Anbringung

Für jedes Modell empfehlen wir Dir einen bestimmten Anbringungspunkt. So kannst Du Deinen Flaschenhalter optimal nutzen und es führt beim Falten des Rollstuhls zu keinen Problemen.

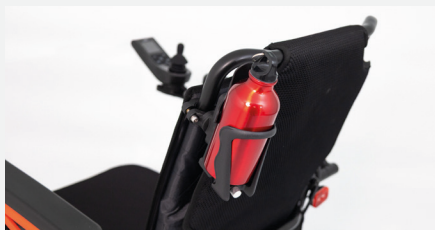


Abbildung 1: Anbringung am ergoflix® LX



Abbildung 2: Anbringung am ergoflix® vario



Abbildung 3: Anbringung am ergoflix® carbon



Abbildung 4: Anbringung am ergoflix® heavy



Abbildung 5: Anbringung am ergoflix® basic

Und so geht's

Lege die Schelle um das Rückenlehnenrohr Deines Rollstuhls (s. Abb. 6). Setze die beiden längsten Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher und ziehe die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest (s. Abb. 7).

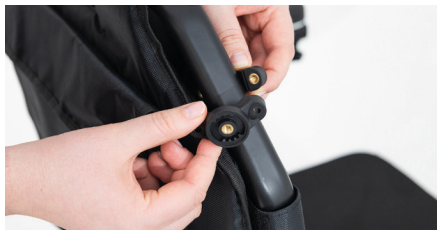


Abbildung 6: Schelle anlegen



Abbildung 7: Schrauben festziehen

Achte darauf, die Schrauben abwechselnd festzuziehen, um ein Verkanten zu vermeiden. Ziehe die Schrauben fest, sodass die Schelle nicht mehr verrutscht (s. Abb. 8). Nimm die Halterung zur Hand und setze die einzelne mittelgroße Schraube in die Öffnung ein (s. Abb. 9). Die Schraube liegt lose in der Öffnung.



Abbildung 8: Festgezogene Schelle



Abbildung 9: Schraube einsetzen

Setze den Flaschenhalter mit der Rückseite an die Halterung an (s. Abb. 10). Achte darauf, dass die Löcher **1-3** durch die Aussparungen sichtbar bleiben (s. Abb. 11).



Abbildung 10: Flaschenhalter ansetzen



Abbildung 11: Schraublöcher

Setze die beiden kleinen Schrauben in die Löcher ein (s. Abb. 12) und ziehe diese fest, um den Flaschenhalter zu fixieren (s. Abb. 13). Der Flaschenhalter kann nun an die Schelle am Rollstuhlrahmen angebracht werden.



Abbildung 12: Schrauben einsetzen



Abbildung 13: Schrauben festziehen

Achte beim Ansetzen auf die Rastnasen der Halterung und der angebrachten Schelle (s. Abb. 14). Richte den Flaschenhalter möglichst senkrecht aus und ziehe die Schraube in der Mitte fest, um den Flaschenhalter zu montieren (s. Abb. 15).



Abbildung 14: Rastnasen



Abbildung 15: Flaschenhalter montieren

Der Flaschenhalter ist nun einsatzbereit (s. Abb. 16). Mithilfe eines Druckknopfs am Boden kann der Durchmesser des Flaschenhalters vergrößert oder verkleinert werden. Drücke dafür auf den Knopf und ziehe gleichzeitig an der vorderen Hälfte des Flaschenhalters (s. Abb. 17).



Abbildung 16: Fertig montierter Flaschenhalter



Abbildung 17: Durchmesser einstellen

Um Feinjustierungen vorzunehmen, kannst Du am silbernen Rädchen drehen. So kannst Du ebenfalls den Durchmesser des Flaschenhalters anpassen (s. Abb. 18). Die Flasche sitzt nun fest im Flaschenhalter (s. Abb. 19).



Abbildung 18: Am Rädchen drehen



Abbildung 19: Fertig eingesetzte Flasche

Le porte-bouteille se fixe sur le cadre et offre un espace pour votre boisson préférée. Grâce aux différentes possibilités de réglage, vous pouvez y insérer des bouteilles de différentes tailles ou des gourdes.

Bon à savoir : Vous aurez besoin de la clé Allen fournie pour l'installation.

Emplacement recommandé

Pour chaque modèle, nous vous recommandons un point de fixation spécifique. Vous pourrez utiliser votre porte-bouteille de manière optimale et cela ne posera aucun problème lors du pliage du fauteuil roulant.

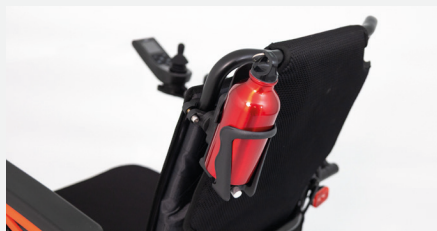


Figure 1: Installation sur l'ergoflix® LX



Figure 2 : Installation sur l'ergoflix® Vario



Figure 3 : Installation sur le FlixOne



Figure 4 : Installation sur l'ergoflix® Heavy

Voici les étapes pour le montage

Placez la bride autour du tube du dossier de votre fauteuil roulant (voir Fig. 5). Insérez les deux vis les plus longues dans les trous prévus à cet effet et serrez-les à l'aide de la clé Allen (voir Fig. 6).

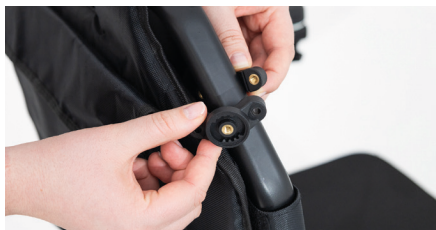


Figure 5 : Mise en place de la bride



Figure 6 : Serrage des vis

Veillez à serrer les vis de manière alternée pour éviter tout désalignement. Serrez les vis fermement afin que la bride ne glisse plus (voir Fig. 7). Prenez le support et insérez la vis de taille moyenne dans l'ouverture prévue (voir Fig. 8). La vis doit rester libre dans l'ouverture.



Figure 7 : Bride serrée



Figure 8 : Insertion de la vis

Placez le porte-bouteille avec son dos contre le support (voir Fig. 9). Assurez-vous que les trous (1-3) restent visibles à travers l'encoche (voir Fig. 10).



Figure 9 : Positionnement du porte-bouteille



Figure 10 : Trous de vis

Insérez les deux petites vis dans les trous (voir Fig. 11) et serrez-les pour fixer le porte-bouteille (voir Fig. 12). Le porte-bouteille peut maintenant être attaché à la bride sur le cadre du fauteuil roulant.



Figure 11 : Insertion des vis



Figure 12 : Serrage des vis

Lors de la mise en place, veillez à aligner les encoches de la fixation et de la bride installée (voir Fig. 13). Alignez le porte-bouteille aussi verticalement que possible et serrez la vis centrale pour monter le porte-bouteille (voir Fig. 14).



Figure 13 : Encoches



Figure 14 : Montage du porte-bouteille

Le porte-bouteille est maintenant prêt à l'emploi (voir Fig. 15). Grâce à un bouton-poussoir situé sur la partie basse, la largeur du porte-bouteille peut être agrandie ou réduite. Pour ce faire, appuyez sur le bouton et tirez simultanément sur la partie avant du porte-bouteille (voir Fig. 16).



Figure 15 : Porte-bouteille monté



Figure 16 : Réglage de la largeur

Pour effectuer des ajustements fins, vous pouvez tourner la molette argentée. Cela vous permet également d'ajuster la largeur du porte-bouteille (voir Fig. 17). La bouteille est maintenant solidement fixée dans le porte-bouteille (voir Fig. 18).



Figure 17: Rotation de la molette



Figure 18: Bouteille correctement mise en place





ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand 

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachte: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Artikel ohne Deko.
Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.
Tous les articles sans décoration.

Art. Nr.: A00065HV2



202606-14