

Montageanleitung

Rollator- und Rollstuhlschloss AXA®



Mit dem Rollstuhlschloss kannst Du Deinen Rollstuhl schnell und zuverlässig sichern, egal ob im Treppenhaus oder draußen. Mit der praktischen Halterung hast Du es immer am Rahmen Deines ergoflix-Rollstuhls dabei.

Gut zu wissen: Du benötigst einen Inbusschlüssel der Größe 4.

Empfohlene Anbringung

Für jedes Modell empfehlen wir Dir einen bestimmten Anbringungspunkt. Die Öffnung der Halterung, um das Schloss einzusetzen, sollte außerdem nach hinten zeigen, sodass es beim Falten des Rollstuhls zu keinen Problemen führt.



Abbildung 1: Anbringung am ergoflix® LX



Abbildung 2: Anbringung am ergoflix® vario



Abbildung 3: Anbringung am ergoflix® carbon



Abbildung 4: Anbringung am ergoflix® heavy



Abbildung 5: Anbringung am ergoflix® basic

Die Schlosshalterung dient nur zum Aufbewahren oder Transport des Rollstuhlschlosses. Es bietet Dir keine Sicherheit, wenn Du Deinen Rollstuhl mit dem Schloss an einem externen Gegenstand (bspw. einer Straßenlaterne) befestigst, während es noch in der Halterung hängt. Entferne das Schloss aus der Halterung, um Deinen Rollstuhl zuverlässig zu sichern.

Und so geht's

Nimm die Schlosshalterung zur Hand und setze den Inbusschlüssel an die Schraube an (s. Abb. 6). Löse das Halterungskabel durch Drehen des Inbusschlüssels gegen den Uhrzeigersinn vollständig. Lege nun die Schlosshalterung um den oberen seitlichen Rahmen Deiner Rückenlehne (s. Abb. 7).



Abbildung 6: Rohrschelle anlegen



Abbildung 7: Schelle und Halterung montieren

Führe das Kabel wieder in die seitliche Öffnung (s. Abb. 8) und ziehe diese mit Hilfe des Inbusschlüssels nach und nach mit dem Uhrzeigersinn fest (s. Abb. 9). Bitte achte darauf, die Schraube beim Festziehen nicht zu überdrehen, da sonst das Gewinde der Schraube Schaden nehmen könnte. Die Schlosshalterung sollte nun eng am Rollstuhlrahmen anliegen und nicht mehr nach links oder rechts verrutschen.



Abbildung 8: Schelle und Halterung montieren



Abbildung 9: Schelle und Halterung montieren

Nun kann das Rollstuhlschloss in die Halterung eingesetzt werden. Führe dazu das Schloss in die dafür vorgesehene Einkerbung (s. Abb. 10) und setze es vollständig ein, bis es sich nicht weiter runterschieben lässt (s. Abb. 11).



Abbildung 10: Einführen des Schlosses



Abbildung 11: Fertig eingesetztes Schloss

Das Rollstuhlschloss lässt sich einfach durch zwei Druckpunkte an der Schlosshalterung lösen (s. Abb. 12). Greife das Schloss von unten und drücke mit der anderen Hand gleichzeitig die beiden Druckpunkte an der Halterung, um das Schloss aus der Halterung nach unten hin zu entfernen (s. Abb. 13).



Abbildung 12: Druckpunkte der Halterung



Abbildung 13: Entfernen des Schlosses

Das Rollstuhlschloss bietet eine automatische Abdeckung an der Schlüsselöffnung, um es vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen (s. Abb. 14). Die Schlüssel des Schlosses sind symmetrisch, was bedeutet, dass die Schlüssel keine Ober- und Unterseite haben und dementsprechend immer ins Schloss passen. Dies bietet Dir eine leichtere Handhabung (s. Abb. 15).



Abbildung 14: Schutzabdeckung



Abbildung 15: Einführen des Schlüssels

Dein Rollstuhlschloss ist nun einsatzbereit und kann verwendet werden.

Um eine sichere Nutzung des Schlosses zu gewährleisten, achte darauf, es nur am Rahmen Deines Rollstuhls anzubringen und nicht an abnehmbare Teile (z. B. das Bedienmodul).

Ziehe das Rollstuhlschloss durch den Rahmen Deiner Rückenlehne (s. Abb. 16) und verbinde das Kabel wieder mit der dafür vorgesehenen Öffnung, ein zusätzliches Abschießen des Schlosses mit dem Schlüssel ist nicht notwendig (s. Abb. 17). Der Rollstuhl ist nun gesichert.



Abbildung 16: Anbringung des Schlosses



Abbildung 17: Fertig montiertes Schloss





ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Besuche uns auf Social Media



Bitte beachte: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Art. Nr.: A00061



202606-15