




Montageanleitung

Teleskoprampe

Guide de montage

Rampes télescopique

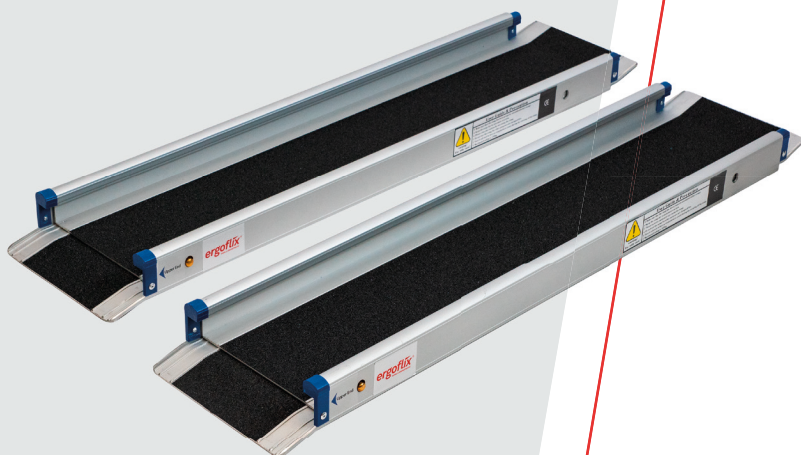

Die ergoflix Teleskoprampen sind aus robustem Aluminium gefertigt und lassen sich problemlos aus- und wieder einschieben. Durch ihr geringes Gewicht lassen sich die Schienen leicht handhaben und können zusammengeschoben kompakt verstaut werden. Die Rampen verfügen über eine rutschfeste und strukturierte Oberfläche und gewährleisten dadurch einen festen Halt.



Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (ca.)	Geschlossen	Geöffnet
Länge	910 mm	1520 mm
Breite	190 mm	190 mm
Höhe	50 mm	50 mm
Gewicht	Einzeln	Zusammen
Kilogramm	3,9 kg	7,8 kg
Tragkraft	Zusammen	
Kilogramm	300 kg	

Inbetriebnahme der Rampen



WARNUNG

Gefahren bei Über- oder Unterschreitung von vorgegebenen Betriebsparametern

Beim Verladen des Rollstuhls können Gefährdungen durch Kippen und Stürzen des Gerätes auftreten. Um dies zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Hinweise:

- Überschreite niemals die maximale Traglast Deiner Rampen.
- Verlade den Rollstuhl nur mit Hilfe der Rampen, wenn Du das Gerät sicher beherrschst.

- Sei bitte beim Be- und Entladen des Rollstuhls stets vorsichtig.
- Stelle Dich niemals in den Weg von Geräten oder Fahrzeugen und achte bitte auf andere Personen und Kinder in unmittelbarer Umgebung.
- Bitte lass angebrachte Rampen nicht unbeaufsichtigt.
- Lade und entlade nur auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Die Rampenoberflächen und – unterkanten haben bei Nässe weniger Haftung. Bitte sei dann besonders aufmerksam und vorsichtig.
- Verwende die Rampen nur für den dafür vorgesehenen Zweck.

Bitte beachte beim Verladen folgende Punkte:

1. Parke den PKW oder den Kleintransporter vor dem Verladen auf festem Untergrund und sichere das Fahrzeug gegen Fortrollen.
2. Lege die Rampen rutschsicher auf den Untergrund auf.
3. Stelle sicher, dass die Rampen sauber und unbeschädigt sind.
4. Stelle sicher, dass die Rampe deutlich breiter ist als der Rollstuhl.
5. Stelle den Rollstuhl mit der Rückenlehne nach vorne in Richtung der Rampe. Rolle oder fahre den Rollstuhl langsam und gleichmäßig die Rampe hinauf, und achte darauf, dass die Räder in der Mitte der Rampe bleiben.
6. Befahre die Rampe mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit.
7. Befahre die Rampe ohne Unterbrechung, um ein Zurückrollen zu verhindern.
8. Achte bitte auf einen ausreichend großen Leerlauf-Bereich, damit der Rollstuhl bei Unterbrechung der Fahrt ein kurzes Stück abwärtsrollen kann.

Instandhaltung

- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Laderampe und die Komponenten vor jedem Gebrauch zu überprüfen.
- Wenn die Rampe beschädigt ist, sollte sie nicht verwendet werden.
- Die Rampe sollte durch regelmäßige Reinigung gewartet werden.

Les rampes télescopiques ergoflix sont fabriquées en aluminium robuste et se déplient et se replient facilement. Grâce à leur faible poids, les rampes sont faciles à manipuler et peuvent être rangées de manière compacte une fois repliées. Les rampes sont dotées d'une surface antidérapante et texturée, ce qui garantit une bonne prise en main.



Dimensions et poids

Dimensions (environs)	Fermée	Ouverte
Longueur	910 mm	1520 mm
Largeur	190 mm	190 mm
Hauteur	50 mm	50 mm
Poids	Une rampe	Les deux rampes
En kilogramme	3,9 kg	7,8 kg
Capacité de charge	Les deux rampes	
En kilogramme	300 kg	

Mise en service des rampes



AVERTISSEMENT

Risque de pincement lors du déploiement et du repliement des rampes télescopiques.

Le chargement du fauteuil roulant non conforme peut présenter des risques de basculement et de chute de l'appareil. Pour éviter cela, respectez les consignes suivantes :

- Ne dépassez jamais la charge maximale de vos rampes.
- Ne chargez le fauteuil roulant à l'aide des rampes que si vous maîtrisez

parfaitement l'appareil.

- Soyez toujours prudent lors du chargement et du déchargement du fauteuil roulant.
- Ne vous placez jamais sur le chemin d'un appareil ou d'un véhicule. Faites attention aux autres personnes et aux enfants dans l'environnement immédiat.
- Ne laissez pas les rampes d'accès sans surveillance.
- Ne chargez et ne déchargez que sur une surface stable et plate.
- Les surfaces et les bords inférieurs des rampes ont moins d'adhérence lorsqu'ils sont mouillés.
- Soyez particulièrement attentif et prudent.
- N'utilisez les rampes que pour l'usage auquel elles sont destinées.


Respectez les points suivants lors du chargement :

1. Garez la voiture ou la camionnette sur une surface solide avant de la charger. et bloquez le véhicule pour l'empêcher de rouler.
2. Posez les rampes sur le sol de manière à ce qu'elles ne glissent pas.
3. Assurez-vous que les rampes sont propres et non endommagées.
4. Assurez-vous que la rampe est nettement plus large que le fauteuil roulant.
5. Placez le fauteuil roulant avec le dossier vers l'avant en direction de la rampe. Poussez ou conduisez le fauteuil roulant (à l'aide du moteur électrique) lentement et régulièrement sur la rampe, en veillant à ce que les roues suivent le milieu de la rampe.
6. Montez la rampe à la vitesse la plus basse possible.
7. Montez la rampe sans vous arrêter pour éviter de reculer.
8. Faites en sorte d'avoir une zone de marche à vide suffisamment grande pour que le fauteuil roulant puisse, en cas d'accident, se déplacer sur une courte distance. La rampe doit pouvoir rouler vers le bas sur une courte distance en cas d'interruption de la course.

Maintenance

- Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'inspecter la rampe de chargement et ses composants avant chaque utilisation.
- Si la rampe est endommagée, elle ne doit pas être utilisée.
- Vous pouvez entretenir la rampe en la nettoyant régulièrement.



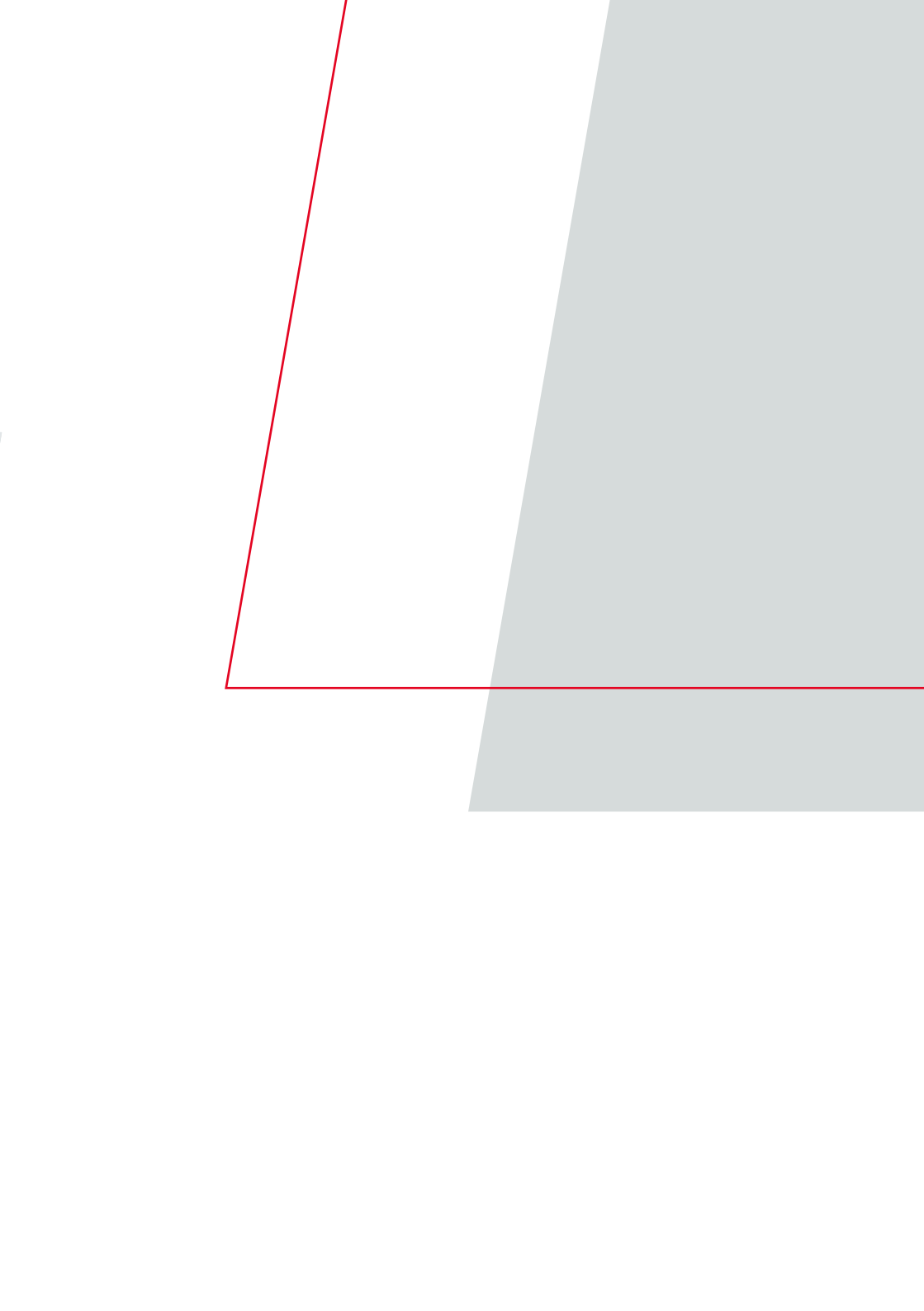

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachte: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.



202606-17