

ergoflīx

Montageanleitung

Universalhalter für Tasche und Handy inkl. Rückspiegel

Guide de montage

Support universel pour sac, téléphone portable, et rétroviseur



Der Universalhalter bietet die Möglichkeit, eine kleine oder eine große Rollstuhltasche sowie ein Handy an Deinem Elektrorollstuhl zu befestigen. Darüber hinaus erhöht der ebenfalls anbringbare Rückspiegel die Sicherheit beim Fahren, indem er eine bessere Sicht auf den Bereich hinter Deinem Rollstuhl ermöglicht, ohne dass Du Dich umdrehen musst.

Sowohl für die linke als auch für die rechte Seite des ergoflix-Rollstuhls ist das Zubehör erhältlich. Beachte, dass das Bedienmodul und der Universalhalter nicht an derselben Seite angebracht werden können.

Gut zu wissen: Für die Montage benötigst Du lediglich den mit dem Zubehör gelieferten Doppel-Maulschlüssel der Größe 14mm und 15mm sowie einen Inbusschlüssel der Größe 4, der dem Toolkit Deines ergoflix-Rollstuhls beiliegt.

Und so geht's

Nimm zunächst das Metallgestell des Universalhalters zur Hand und bringe die Handyhalterung an. Schraube dazu den Drehverschluss der Handyhalterung ab und setze diesen auf den Kugelkopf des Metallgestells (s. Abb. 1). Nimm nun die Handyhalterung und klicke sie auf den Kugelkopf (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Drehverschluss auf den Kugelkopf setzen



Abbildung 2: Schelle und Halterung montieren

Diese Verbindung ermöglicht es Dir, die Handyhalterung in eine individuelle Position zu bringen. Schraube anschließend den Drehverschluss von unten fest (s. Abb. 3). Löse die Feststellschraube unter der Armlehne und entferne die schwarze runde Abdeckung (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Drehverschluss von unten festschrauben



Abbildung 4: Entfernen der Abdeckung

Befestige nun das Metallgestell des Universalhalters an Deinem Rollstuhl, indem Du diesen in die Aufnahmeöffnung der Armlehne einführst (s. Abb. 5) und mit der Feststellschraube fixierst (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Universalhalter in die Aufnahmeöffnung der Armlehne einführen



Abbildung 6: Universalhalter mit der Feststellschraube fixieren

Befestigung Deines Handys

Die Befestigung Deines Handys an der Handyhalterung ist ganz simpel. Nimm das im Lieferumfang enthaltene Patch und klebe es auf die Rückseite Deiner Handyhülle (s. Abb. 7). Die Klebefläche sollte staub- und fettfrei sein. Beachte bitte, dass das Patch nicht direkt auf das Handy geklebt werden darf, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.



Abbildung 7: Patch auf die Handyhülle kleben

Das Patch wird magnetisch angezogen, sodass Dein Handy sicher an der Halterung befestigt ist (s. Abb. 8). Um Dein Handy von der Haltung wieder abzunehmen, drücke den Ring unterhalb der Halterung (s. Abb. 9), um die Verbindung zu lösen.



Abbildung 8: Handy magnetisch ansaugen lassen



Abbildung 9: Handy abnehmen

Befestigung des Rückspiegels

Montiere nun den Rückspiegel am Metallgestell des Universalhalters (s. Abb. 10). Platziere die Mutter durch Drehen so, dass sie sich im oberen Drittel des Gewindes befindet. Richte bei Bedarf den Spiegel in die gewünschte Richtung aus. Schraube anschließend das Gewinde des Rückspiegels ca. bis zur Mitte in die Öffnung des Universalhalters. Ziehe nun die Mutter in Richtung des Universalhalters mit dem Maulschlüssel fest (s. Abb. 11).



Abbildung 10: Rückspiegel am Metallgestell montieren



Abbildung 11: Ziehe die Mutter mithilfe des Maulschlüssels der Größe 15 fest

Du hast die Möglichkeit, einige weitere Einstellungen an dem Rückspiegel vorzunehmen: Durch Bewegen des Gelenks an der Innensechskantschraube passt Du den Winkel des Spiegels an (s. Abb. 12). Des Weiteren kannst Du den Blickwinkel verfeinern, indem Du die Mutter, die sich oberhalb der Innensechskantschraube befindet, mit dem Maulschlüssel Größe 14 löst.

Bewege den Spiegel in Deine Wunschrichtung und drehe die Mutter fest, wenn Du die Position gefunden hast, die für Dich ideal geeignet ist (s. Abb. 13). Mit Hilfe des Gelenks, das sich direkt unterhalb der Spiegelfläche befindet, kannst Du noch eine Feinjustierung vornehmen.



Abbildung 12: Lösen und Verstellen am Gelenk der Innensechskantschraube



Abbildung 13: Mutter lösen, um individuelle Positionierung vorzunehmen

Abschwenken des Universalhalters

Da der Spiegel nach außen abgewinkelt ist, gewinnt der Rollstuhl an Breite hinzu. Damit Du bequem Türen durchfahren kannst, bietet der Universalhalter eine praktische Funktion: Löse die Sternschraube (s. Abb. 14) und schwenke den Halter nach innen (s. Abb. 15). Nachdem Du die Engstelle passiert hast, bringe den Universalhalter wieder in seine Ausgangsposition und ziehe die Sternschraube fest.



Abbildung 14: Sternschraube lösen



Abbildung 15: Abgeschwungener Universalhalter

Fährst Du an einen Tisch heran, empfehlen wir Dir, ebenfalls den Universalhalter nach innen abzuschwenken. Ist der Spiegel im Weg, klappe diesen einfach ein oder demontiere ihn bei Bedarf mit nur wenigen Handgriffen.

Mit Hilfe des FIDLOCK-Systems kannst Du nun Deine Tasche am Universalhalter befestigen. Dank der beiden Magnete, die sich am Universalhalter und an den Rollstuhltaschen befinden, benötigst Du auch hier kein weiteres Werkzeug für die Montage. Die Rollstuhltasche lässt sich ganz einfach montieren und auch wieder abnehmen.

Befestigen der kleinen Rollstuhltasche

Halte die Magnete, die sich an der kleinen Rollstuhltasche befinden, parallel zu den Magneten des Universalhalters (s. Abb. 16). Dank der magnetischen Anziehung ist die Tasche direkt befestigt. Überprüfe, dass sich die Magnete angezogen haben und die Tasche fest ist.

Um die kleine Rollstuhltasche wieder zu entfernen, ziehe an der Stoffflasche, so dass sich die Magnete voneinander lösen (s. Abb. 17). Beachte, dass die Stoffflasche nur zum Anbringen und Lösen der Tasche gedacht ist und nicht als Tragegriff im Allgemeinen.



Abbildung 16: Ausrichten der Rollstuhltasche



Abbildung 17: Entfernen der kleinen Rollstuhltasche

Gut zu wissen: Mit der kleinen Rollstuhltasche wird auch ein langer Tragegurt mitgeliefert. Diesen kannst Du mit Hilfe der Haken an der Tasche befestigen und die Länge entsprechend einstellen.

Befestigen der großen Rollstuhltasche

Setze den Haken, der sich unten an der großen Rollstuhltasche befindet, auf den Bügel des Universalhalters (s. Abb. 18). Dadurch befindet sich die Tasche direkt auf der richtigen Höhe und lediglich eine Feinjustierung ist notwendig, so dass sich die Magnete des Universalhalters und die der Tasche anziehen. Überprüfe, dass sich die Magnete angezogen haben und die Tasche fest ist.

Um die große Rollstuhltasche wieder zu entfernen, ziehe an der Stoffflasche (s. Abb. 19). Nutze den mittigen Tragegriff, um die Tasche zu transportieren. Die Stoffflasche dient lediglich dazu, die Tasche von dem Elektrorollstuhl zu entfernen.



Abbildung 18: Einhängen der großen Rollstuhltasche

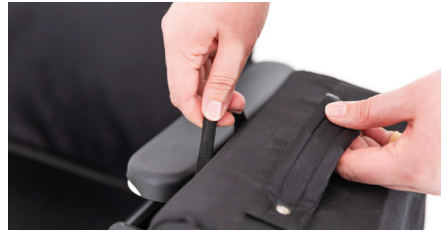


Abbildung 19: Entfernen der Rollstuhltasche

Gut zu wissen: Mit der großen Rollstuhltasche wird auch ein langer Tragegurt mitgeliefert. Diesen kannst Du mit Hilfe der Haken an der Tasche befestigen und die Länge entsprechend einstellen.

Achte darauf, die Tasche mit nicht mehr als fünf Kilo zu beladen. Der Haken und der Bügel eignen sich perfekt zur Unterstützung und Führung, um die Tasche zu befestigen, wenn diese voll beladen ist.

Bitte beachte die folgenden Warnhinweise:



Magnetisches Feld

Magnete erzeugen ein weit reichendes, starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Fernseher und Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen.

- Halte Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.



Herzschrittmacher

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

- Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
- Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr.
- Halte als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten.
- Warne Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.

Diese Gebrauchsanweisung vor Befestigung und erster Benutzung bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren!

WICHTIG: SICHERHEITSHINWEISE

Um mögliche Schäden zu vermeiden, folgende Hinweise lesen und befolgen:

Lebensgefahr durch Störung von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren (ICD) durch statische Magnetfelder! Immer einen ausreichenden Abstand zwischen Produkt und Herzschrittmachern oder Defibrillatoren (ICD) einhalten.

Verletzungsgefahr durch Ablenkung! Nicht vom Smartphone ablenken lassen, besonders im Straßenverkehr.

Verletzungsgefahr durch Verwendung an Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder bei Extremsportarten! Produkt nicht außen an Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen verwenden. Produkt nicht verwenden, während Sie Extremsport treiben sowie bei Aktivitäten, bei denen Sie sich hohem Luft- oder Wasserwiderstand aussetzen.

Verletzungsgefahr durch aufgetretene Mängel gleich welcher Art am Produkt! Benutzung umgehend einstellen und Fachhändler kontaktieren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

VACUUM ist ein Haltersystem, bei dem base und patch durch Magnete zusammengehalten und von einem Saugnapf gesichert werden, an dem ein Unterdruck entsteht, sobald hohe Kräfte auf das patch wirken.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des VACUUM uni phone patch ist die Befestigung und Benutzung an einem Smartphone-Cover mit fester, ebener Oberfläche in Kombination mit einer VACUUM base. Die Benutzung darf ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Originalprodukten erfolgen. Andernfalls kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.

Jede von dieser bestimmungsgemäßen Verwendung abweichende Benutzung gilt als bestimmungswidrig und kann zu Verletzungen, Beschädigungen oder Fehlfunktionen führen.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit ca.: -5 °C bis 60 °C

Material: Neodym, PA, Acrylat

Hergestellt in China

BEFESTIGUNG

Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Befestigung Fachhändler um Rat bitten!

ACHTUNG Sachschäden durch Aufkleben direkt auf einem Smartphone ohne Smartphone-Cover! Produkt nicht direkt auf das Smartphone kleben, sondern nur auf ein separates Smartphone-Cover mit geeigneter Oberfläche.

ACHTUNG Unzureichende Haltekraft durch Aufkleben auf ungeeigneten Oberflächen! Produkt nicht auf Smartphone-Cover mit einer Oberfläche aus Keramik, Silikon, silikonähnlichem Material oder Leder sowie texturierten, genarbt oder gewölbten Oberflächen kleben.

ACHTUNG Zerbrechen des Magnets durch Verbiegen! Verbiegen des Produkts unbedingt vermeiden. Produkt nicht verwenden, wenn der Magnet zerbrochen ist.

Die Haltekraft des VACUUM-Haltersystems ist davon abhängig, wie gut das VACUUM uni phone patch auf dem verwendeten Smartphone-Cover anliegt und klebt. Geeignete Oberflächen zum Befestigen sind ebene und glatte Flächen im Klebe-

bereich. Gewölbte Flächen und Aussparungen innerhalb des Klebe-bereichs, z. B. für Kameras, führen dazu, dass die Haltekraft sehr stark reduziert ist!

Nach dem Aufkleben kann die Position des VACUUM uni phone patch auf dem Smartphone-Cover nicht mehr verändert oder korrigiert werden.

1. Vor dem Aufkleben sicherstellen, dass das VACUUM uni phone patch an der gewünschten Stelle auf dem Smartphone-Cover vollständig und auf einer ebenen Fläche aufliegt.
2. Mit beiliegendem Reinigungstuch die Oberfläche des Smartphone-Covers reinigen. Das VACUUM uni phone patch erreicht seine volle Haftwirkung nur, wenn keine Wasser-rückstände oder Verunreinigungen auf der zu beklebenden Oberfläche verblieben sind.
3. VACUUM uni phone patch mittig auf der Rückseite des Smartphone-Covers positionieren. Bei sehr großen Kamera-öffnungen kann es notwendig sein, das VACUUM uni phone patch etwas unterhalb der Mitte zu positionieren.
4. Beiliegende Klammer als Positionierungshilfe beim Aufkleben verwenden: Klammer mittig auf die magnetische Kontaktfläche des VACUUM uni phone patch setzen.
5. Die Schutzfolie vom Klebe-Pad abziehen.
6. VACUUM uni phone patch auf das Smartphone-Cover kleben und fest andrücken.
7. Für 72 Stunden vollständig trocknen lassen. Erst dann ist die volle Klebewirkung erreicht.

REINIGUNG

GEFAHR Lebensgefahr durch Störung von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren (ICD) durch statische Magnetfelder! Immer einen ausreichenden Abstand zwischen Produkt und Herzschrittmachern oder Defibrillatoren (ICD) einhalten.

GEFAHR Brandgefahr durch kabelloses Laden! Kabellose Lade-funktion des Smartphones nicht benutzen, wenn das Smartphone sich im Smartphone-Cover mit aufgeklebtem VACUUM uni phone patch befindet. Zum kabellosen Laden immer das Smartphone aus dem Smartphone-Cover mit aufgeklebtem VACUUM uni phone patch herausnehmen.

ACHTUNG Funktionsbeeinträchtigungen durch Verwendung mit ungeeigneten Produkten! Ausschließlich die für die Benutzung mit dem Produkt vorgesehenen Originalprodukte verwenden.

ACHTUNG Sachschäden durch Verschmutzungen! Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass Produkt und Zubehör frei von Verschmutzungen sind. Produkt und Zubehör bei Verschmutzungen von Hand mit einem weichen Tuch und klarem Wasser reinigen.

ACHTUNG Sachschäden durch Kratzer! Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass Produkt und Zubehör frei von Kratzern sind.

ACHTUNG Sachschäden durch extreme Temperaturen! Produkt nicht Temperaturen außerhalb von ca. -5 °C bis ca. 60 °C aussetzen.

Vor Benutzung mit der Handhabung von Produkt und Zubehör vertraut machen und deren einwandfreie Funktion überprüfen. Sicherstellen, dass die Befestigung ordnungsgemäß erfolgt ist.

Verbinden mit einer VACUUM base

1. Smartphone-Cover mit aufgeklebtem VACUUM uni phone patch an die verwendete VACUUM base führen und an die VACUUM base schnappen lassen. Sie hören das „Schnapp-

1. Geräusch“, sobald sich *VACUUM uni phone patch* und *VACUUM base* berühren.

⚠ GEFAHR Verletzungsgefahr durch Ablenkung! Nicht vom Smart-phone ablenken lassen, besonders im Straßenverkehr.

ACHTUNG Sachschäden durch Lösen des Smartphones bei Stößen! Sicherstellen, dass Sie zu keinem Zeitpunkt gegen das Smartphone-Cover mit aufgeklebtem *VACUUM uni phone patch* stoßen können, da es sich andernfalls von der *VACUUM base* lösen kann. Sicherstellen, dass das Produkt von der *VACUUM base* vollständig und hindernisfrei angezogen werden kann.

2. Am Smartphone-Cover ziehen, um zu prüfen, ob das aufgeklebte *VACUUM uni phone patch* und die verwendete *VACUUM base* fest verbunden sind. Das Smartphone-Cover mit *VACUUM uni phone patch* darf sich nicht durch Ziehen von der *VACUUM base* lösen.

Das Smartphone-Cover mit *VACUUM uni phone patch* löst sich durch Ziehen von der verwendeten *VACUUM base*?

Sicherstellen, dass der Bedienehebel an der *VACUUM base* nicht nach hinten gedrückt und frei beweglich ist.

Lösen von einer *VACUUM base*

1. Bedienehebel der verwendeten *VACUUM base* nach hinten drücken. Bei gedrücktem Bedienehebel das Smartphone-Cover mit aufgeklebtem *VACUUM uni phone patch* entnehmen.

Der Bedienehebel lässt sich nicht nach hinten drücken?

Sicherstellen, dass keine Gegenstände von hinten gegen den Bedienehebel drücken.

2. Bedienehebel loslassen.

REINIGUNG

ACHTUNG Sachschäden durch Reinigen in der Spülmaschine oder Waschmaschine! Produkt nicht in der Spülmaschine oder Waschmaschine reinigen.

1. Smartphone aus dem Smartphone-Cover mit aufgeklebtem *VACUUM uni phone patch* herausnehmen.

2. Das auf dem Smartphone-Cover aufgeklebte *VACUUM uni phone patch* von Hand mit klarem Wasser reinigen.

3. Smartphone-Cover mit aufgeklebtem *VACUUM uni phone patch* vollständig trocknen lassen, bevor Sie Ihr Smartphone in das Smartphone-Cover einsetzen.

AUFBEWAHRUNG

ACHTUNG Sachschäden durch extreme Temperaturen!

Produkt nicht Temperaturen außerhalb von ca. -5 °C bis ca. 60 °C aussetzen.

Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren.

ENTSORGUNG

Produkt kann im Hausmüll entsorgt werden. Hierzu auch die Hinweise zur Entsorgung Ihres Smartphone-Covers beachten. Die geltenden Umweltvorschriften in Ihrem Land hinsichtlich der Entsorgung beachten.

HAFTUNG

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Gebrauchsanweisung richtig, vollständig und so exakt wie möglich zu gestalten. Abweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden, sodass für Fehler in der zur Verfügung gestellten Gebrauchsanweisung keine Haftung übernommen werden kann.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchs-

anweisung oder die nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Produkt zweckentfremdet, unsachgemäß verwendet oder eigenmächtig repariert, wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

IMPRESSUM

Die *VACUUM*-Technologie ist durch ein(e) oder mehrere Patent(e)/Patent-anmeldung(en) rechtlich geschützt. Weitere Informationen zum Patentschutz der *VACUUM*-Produktreihe erhalten Sie auf: www.fidlock.com/patents

Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Deutschland, AG Hannover, HRB 204281, E-Mail: info-bike@fidlock.com

Le support universel conçu pour les fauteuils roulants ergoflix permet de fixer aisément un sac pour fauteuil, de petite ou grande taille, à l'accoudoir, et offre également un emplacement pour un téléphone portable. Pour renforcer la sécurité durant vos déplacements, un rétroviseur peut être ajouté, vous offrant une vue claire de l'espace derrière le fauteuil, sans nécessiter de se retourner.

Ces accessoires sont adaptés aussi bien pour le côté gauche que pour le côté droit du fauteuil. Il est important de noter que le support universel et le module de commande doivent être installés sur des côtés opposés du fauteuil.

Bon à savoir : Pour le montage, vous avez seulement besoin de la clé à fourche double de 14 et 15 mm, fournie avec cet accessoire, ainsi que d'une clé Allen de 4, fournie dans le kit d'outils de votre fauteuil roulant ergoflix.

Et voici les étapes de montage :

Commencez par assembler le cadre métallique du support universel. Pour cela, dévissez la fermeture rotative du support de téléphone portable et placez celle-ci sur la tête sphérique du support métallique (voir Fig. 1). Prenez ensuite le support de téléphone portable et cliquez-le sur la tête sphérique (voir Fig. 2).



Figure 1 : Placement du verrou tournant sur la tête de fixation



Figure 2 : Attachement du support de téléphone portable sur la petite tête de fixation

Cette étape permet d'ajuster le support de téléphone selon vos préférences. Pour finaliser l'installation, vissez le bouchon à vis sous la base du support (voir Fig. 3). Desserrez la vis de verrouillage sous l'accoudoir et retirez le couvercle rond noir (voir Fig. 4).



Figure 3 : Vissage du bouchon à vis par le bas



Figure 4 : retrait du capot

Fixez maintenant le cadre métallique du support universel à votre fauteuil roulant, en l'insérant dans le tube de l'accoudoir (voir Fig. 5) et en le fixant avec la vis de blocage (voir Fig. 6).



Figure 5 : Insertion du support universel dans le tube de l'accoudoir



Figure 6 : fixation du support universel avec la vis de blocage

Connecter votre téléphone

Attacher votre téléphone portable au support dédié est très simple. Prenez le patch fourni et collez-le à l'arrière de votre coque de téléphone (voir Fig. 7). La surface adhésive doit être exempte de poussière et de graisse. Veuillez noter que le patch ne doit pas être appliqué directement sur le téléphone pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.



Figure 7 : collage du patch sur la coque du téléphone

Le patch, attiré magnétiquement, assure une fixation solide de votre téléphone portable au support (voir Fig. 8). Pour retirer votre téléphone, appuyez sur l'anneau situé sous le support (voir Fig. 9) afin de libérer la connexion.



Figure 8 : fixation magnétique du téléphone portable



Figure 9 : Décrochage du téléphone portable

Fixation du rétroviseur

Montez maintenant le rétroviseur sur le cadre métallique du support universel (voir Fig. 10). Placez l'écrou en le tournant de manière qu'il soit dans le tiers supérieur du filetage. Si nécessaire, pointez le miroir dans la direction souhaitée. Vissez ensuite le filetage du rétroviseur dans l'ouverture du support universel vers le milieu. Serrez maintenant l'écrou dans le sens du support universel avec la clé à fourche (voir Fig. 11).



Figure 10 : Montage du rétroviseur sur le cadre métallique



Figure 11 : Serrez l'écrou à l'aide d'une clé plate de 15.

Vous pouvez effectuer quelques réglages supplémentaires sur le rétroviseur. En déplaçant l'articulation sur la vis à six pans creux, vous pouvez ajuster l'angle du rétroviseur (voir Fig. 12). Vous pouvez également affiner l'angle de vue en desserrant l'écrou qui se trouve au-dessus de la vis à six pans creux, à l'aide de la clé

Ainsi, vous pouvez déplacer le miroir dans la direction que vous souhaitez et serrer l'écrou lorsque vous avez trouvé la position idéale pour vous (voir Fig. 13). À l'aide de l'articulation qui se trouve juste en dessous de la surface du miroir, vous pouvez encore procéder à un réglage fin.



Figure 12 : Desserrage et réglage de l'assemblage de la vis à six pans



Figure 13 : Desserrage de l'écrou pour effectuer un positionnement individuel

Pivotement du support universel

L'ajout du rétroviseur sur le fauteuil roulant augmente sa largeur totale, ce qui peut nécessiter plus d'espace pour manœuvrer. Pour réduire cet inconvénient et faciliter le passage des portes, le support universel est équipé d'une fonction pratique de pivot. Desserrez simplement la vis en étoile, (voir Fig. 14), et faites pivoter le support vers l'intérieur (voir Fig. 15).

Une fois le passage étroit franchi, remplacez le support dans sa position initiale et resserrez la vis en étoile pour sécuriser le dispositif.



Figure 14 : desserrage de la vis en étoile



Figure 15 : support universel pivotant

Lorsque vous vous rapprochez d'une table, nous vous recommandons de faire pivoter également le support universel vers l'intérieur. Si le miroir vous gêne, vous pouvez le rabattre ou le retirer facilement, en quelques gestes.

À l'aide du système FIDLOCK, vous pouvez désormais attacher votre sac au support universel. Grâce aux deux aimants qui se trouvent sur le support universel et sur les sacs pour fauteuil roulant, vous n'avez besoin d'aucun outil supplémentaire pour le montage. Le sac pour fauteuil roulant est très facile à monter et à retirer.

Fixation du petit sac pour fauteuil roulant

Gardez les aimants du petit sac pour fauteuil roulant parallèles aux aimants du support universel (voir Fig. 16). Grâce à l'attraction magnétique, le sac est directement attaché. Vérifiez que les aimants se sont attirés et que le sac est bien serré.

Pour retirer le petit sac pour fauteuil roulant, tirez sur la languette en tissu, de manière à séparer les aimants (voir Fig. 17). Notez que la languette en tissu est uniquement destinée à attacher et détacher le sac. Elle ne doit pas être utilisée comme poignée de transport.



Figure 16 : Alignement du sac pour fauteuil roulant au support



Figure 17 : retrait du petit sac pour fauteuil roulant

Bon à savoir : Une longue sangle de transport est également incluse avec le petit sac pour fauteuil roulant. Vous pouvez l'attacher au sac à l'aide des crochets et ajuster la longueur à votre convenance.

Fixation du grand sac pour fauteuil roulant

Placez le crochet qui se trouve en bas du grand sac pour fauteuil roulant sur le support universel (voir Fig. 18). Le sac est placé ainsi directement à la bonne hauteur et seul un réglage fin est nécessaire, afin que les aimants du support universel et ceux du sac s'attirent. Vérifiez que les aimants se sont attirés et que le sac est bien fixé.

Pour retirer le grand sac pour fauteuil roulant, tirez sur la languette en tissu (voir Fig. 19). Utilisez la poignée de transport centrale pour transporter le sac.



Figure 18 : Accrochage du grand sac pour fauteuil roulant

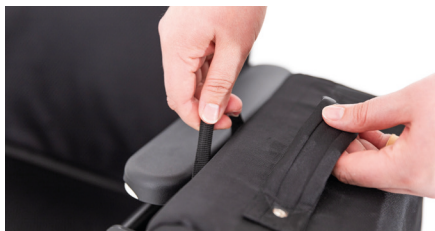


Figure 19 : Retrait du sac pour fauteuil roulant

Bon à savoir : Le grand sac pour fauteuil roulant est également livré avec une longue sangle de transport. Vous pouvez l'attacher au sac à l'aide des crochets et ajuster la longueur à votre convenance.

Veillez à ne pas charger le sac de plus de cinq kilos. Le crochet et l'anse sont parfaits pour soutenir et guider le sac lorsqu'il est entièrement chargé.

Veillez respecter les avertissements suivants :



Champ magnétique

Les aimants génèrent un champ magnétique puissant et de grande portée. Ils peuvent notamment endommager les téléviseurs et ordinateurs portables, les disques durs d'ordinateur, les cartes de crédit et cartes bancaires, les supports de données, les montres mécaniques, les appareils auditifs et les haut-parleurs.

- Tenez les aimants éloignés de tous les appareils et objets susceptibles d'être endommagés par des champs magnétiques puissants.



Stimulateur cardiaque

Les aimants peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.

- Un stimulateur cardiaque peut passer en mode test et provoquer un malaise.
- Un défibrillateur peut, dans certains cas, ne plus fonctionner correctement.
- En tant que porteur de tels dispositifs, maintenez une distance suffisante par rapport aux aimants.
- Avertissez les porteurs de tels dispositifs de ne pas s'approcher des aimants.

Lire attentivement cette notice d'utilisation avant la fixation et la première utilisation et la conserver !

IMPORTANT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter d'éventuels dommages, lire et respecter les consignes suivantes :

Risque mortel lié à la perturbation de stimulateurs cardiaques ou défi-brillateurs (DAI) par des champs magnétiques statiques ! Toujours res-pecter une distance suffisante entre le produit et des stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs (DAI).

Risque de blessures lié au détournement de l'attention ! Ne pas se laisser distraire par son smartphone, en particulier sur la chaussée.

Risque de blessures lié à l'utilisation sur des engins terrestres, aériens et nautiques ou lors de la pratique de sports extrêmes ! Ne pas utiliser le produit à l'extérieur sur des engins terrestres, aériens ou nautiques. Ne pas utiliser le produit pendant la pratique d'un sport extrême ainsi que lors d'activités au cours desquelles vous êtes soumis à une forte résistance de l'air ou de l'eau.

Risque de blessures lié à l'apparition de défauts de quelque nature que ce soit sur le produit ! Cesser immédiatement l'utilisation et contacter un revendeur spécialisé.

UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

VACUUM est un système de support magnétique avec lequel la base et le patch sont maintenus ensemble par des aimants et fixés par une ventouse sur laquelle une dépression est exercée dès que le patch est soumis à des forces élevées.

Le VACUUM uni phone patch est utilisé de manière conforme lorsqu'il est fixé et utilisé sur une coque de smartphone dotée d'une surface rigide et plane en combinaison avec une VACUUM base. L'utilisation se fait exclusivement en association avec les produits originaux prévus à cet effet. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements peuvent apparaître.

Toute utilisation contraire à cette utilisation conforme est considérée comme non conforme et peut provoquer des blessures, des détériorations ou des dysfonctionnements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique env. : -5 °C à 60 °C

Matériau : néodyme, PA, acrylate

Fabriquée en Chine

FIXATION

En cas de doutes concernant la fixation, s'adresser à un revendeur spécialisé pour obtenir des conseils !

ATTENTION Dégâts matériels liés au collage directement sur un smartphone sans coque ! Ne pas coller le produit directement sur le smartphone, mais uniquement sur une coque de smartphone séparée dotée d'une surface adaptée.

ATTENTION Pouvoir d'adhérence insuffisant lié au collage sur des surfaces inadaptées ! Ne pas coller le produit sur une coque de smart-phone dotée d'une surface en céramique, en silicone, dans une matière similaire au silicone ou en cuir, ainsi que sur des surfaces texturées, grai-nées ou bombées.

ATTENTION Rupture de l'aimant liée à la torsion ! Éviter absolument de tordre le produit. N'utilisez pas le produit si l'aimant est cassé.

La force de retenue du système de support VACUUM dépend de la quali-té de la pose et du collage du VACUUM uni phone

patch sur la coque de smartphone utilisée.

Des surfaces plates et lisses dans la zone de collage sont des supports adaptés à la fixation. Des surfaces bombées et des évidements dans la zone de collage, p. ex. pour les appareils-photo, provoquent une très forte réduction de la force de retenue !

Après avoir collé le VACUUM uni phone patch sur la coque de smartphone, il n'est plus possible de modifier ou corriger sa position.

1. Avant le collage, s'assurer que le VACUUM uni phone patch repose entièrement à l'endroit souhaité sur la coque de smartphone et sur une surface plane.
2. Nettoyer la surface de la coque de smartphone avec le chiffon de nettoyage fourni. Le VACUUM uni phone patch atteint sa pleine adhérence uniquement lorsqu'il ne reste plus aucun résidu d'eau ni impureté sur la surface à coller.
3. Positionner le VACUUM uni phone patch au milieu de la face arrière de la coque de smartphone. Avec des ouvertures d'appareil-photo très grandes, il peut être nécessaire de placer le VACUUM uni phone patch un peu en-dessous du centre.
4. Utiliser le clip fourni comme aide au positionnement pendant le collage : placez le clip au milieu sur la surface de contact magnétique du VACUUM uni phone patch.
5. Retirer le film protecteur du pad adhésif.
6. Coller le VACUUM uni phone patch sur la coque de smartphone et ap-puyer fermement.
7. Laisser sécher entièrement pendant 72 heures. La pleine adhérence n'est atteinte qu'au terme de cette durée.

UTILISATION

⚠ DANGER Risque mortel lié à la perturbation de stimulateurs car-diaques ou défibrillateurs (DAI) par des champs magnétiques sta-tiques ! Toujours respecter une distance suffisante entre le produit et des stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs (DAI).

⚠ DANGER Risque d'incendie lié au chargement sans fil ! Ne pas utiliser la fonction de recharge sans fil lorsque le smartphone se trouve dans la coque de smartphone avec le VACUUM uni phone patch collé. Pour la recharge sans fil, toujours retirer le smartphone de la coque de smartphone avec le VACUUM uni phone patch collé.

ATTENTION Dysfonctionnements liés à l'utilisation de produits inadaptés ! Utiliser exclusivement avec les produits originaux prévus pour l'utilisation avec le produit.

ATTENTION Dégâts matériels liés à l'encrassement ! Avant chaque utilisation, vérifier que le produit et les accessoires ne sont pas sales. Éliminer les saletés sur le produit et les accessoires en les lavant à la main avec un chiffon doux et de l'eau claire.

ATTENTION Dégâts matériels liés aux rayures ! Avant chaque utilisation, vérifier que le produit et les accessoires ne sont pas rayés.

ATTENTION Dégâts matériels liés à des températures extrêmes ! Ne pas exposer le produit à des températures inférieures à -5 °C environ et supérieures à 60 °C environ.

Avant l'utilisation, se familiariser avec le maniement du produit et des accessoires et vérifier leur parfait fonctionnement. S'assurer que la fixation est effectuée correctement.

Liaison avec une VACUUM base

1. Approcher la coque de smartphone avec *VACUUM uni phone patch* collé près de la *VACUUM base* utilisée et laisser la *VACUUM base* s'enclencher. Vous entendez le clic dès que le *VACUUM uni phone patch* et la *VACUUM base* entrent en contact.

⚠ DANGER Risque de blessures lié au détournement de l'attention ! Ne pas se laisser distraire par son smartphone, en particulier sur la chaussée.

ATTENTION Dégâts matériels liés au détachement du smartphone en cas de chocs ! S'assurer que vous ne pouvez à aucun moment taper contre la coque de smartphone avec le *VACUUM uni phone patch* collé. Dans le cas contraire, elle peut se détacher de la *VACUUM base*. Veiller à ce que le produit puisse être retiré de la *VACUUM base* intégralement et sans obstacle.

2. Tirer sur la coque de smartphone pour vérifier si le *VACUUM uni phone patch* et la *VACUUM base* utilisée sont solidement reliés. La coque de smartphone avec *VACUUM uni phone patch* ne doit pas se détacher de la *VACUUM base* lorsqu'on exerce une traction.

La coque de smartphone avec *VACUUM uni phone patch* se détache de la *VACUUM base* lorsqu'on exerce une traction ?

Vérifier que le levier de commande sur la *VACUUM base* n'est pas abaissé vers l'arrière et qu'il est mobile

Retrait d'une VACUUM base

1. Pousser le levier de commande de la *VACUUM base* utilisée vers l'arrière. Lorsque le levier de commande est abaissé, retirer la coque de smartphone avec le *VACUUM uni phone patch* collé.

Impossible de pousser le levier de commande vers l'arrière ?

Vérifier qu'aucun objet n'exerce une pression par l'arrière sur le levier de commande.

2. Relâcher le levier de commande.

NETTOYAGE

ATTENTION Dégâts matériels liés au nettoyage au lave-vaisselle ou au lave-linge ! Ne pas nettoyer le produit au lave-vaisselle ou au lave-linge.

1. Retirer le smartphone de la coque de smartphone avec le *VACUUM uni phone patch* collé.
2. Nettoyer le *VACUUM uni phone patch* collé sur la coque de smartphone à la main avec de l'eau claire.
3. Laisser sécher intégralement la coque de smartphone avec le *VACUUM uni phone patch* collé, avant d'insérer votre smartphone dans la coque de smartphone.

RANGEMENT

ATTENTION Dégâts matériels liés à des températures extrêmes ! Ne pas exposer le produit à des températures inférieures à -5 °C environ et supérieures à 60 °C environ.

Ranger le produit dans un endroit sec.

MISE AU REBUT

Le produit peut être jeté avec les déchets ménagers. Pour ce faire, suivre les consignes de mise au rebut fournies avec votre coque de smartphone. Respecter la législation environnementale applicable dans votre pays relative à la mise au rebut.

RESPONSABILITÉ

Nous avons déployé tous nos efforts pour concevoir une notice

d'utilisation correcte, complète et aussi exacte que possible. Des différences ne peuvent être totalement exclues, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être assumée pour les erreurs présentes dans la notice d'utilisation mise à disposition.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de la notice d'utilisation ou de l'utilisation non conforme.

Si le produit est utilisé autrement, incorrectement, ou réparé de manière non concertée, aucune responsabilité ne peut être assumée pour d'éventuels dommages.

MENTIONS LÉGALES

La technologie *VACUUM* est protégée légalement par un ou plusieurs brevets/dépôts de demandes de brevets. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection par brevet de la gamme de produits *VACUUM* sur :

www.fidlock.com/patents

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet :

www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Strasse 39, 30659 Hanovre, Allemagne, RCS Tribunal d'instance d'Hanovre, HRB 204281,

e-mail : #info-bike@fidlock.com





ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00037



202607-04