

ergoflix

Montageanleitung

Stockhalter-Set

Guide de montage

Set porte-canne



Mit dem praktischen Stockhalter-Set hast Du Deine Gehhilfe immer dabei und griffbereit. Die Halterung wird ganz einfach am Rahmen Deines ergoflix-Rollstuhls befestigt.

Gut zu wissen: Du benötigst einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2.

Und so geht's:

Nimm die lange, E-förmige Klemme zur Hand und führe diese hinter den Reflektor durch das Rahmengestell (s. Abb. 1). Setze nun die kürzere, C-förmige Klemme darauf (s. Abb. 2).



Abb. 1: Anbringung am unteren Rahmengestell



Abb. 2: Ansetzen der kürzeren, C-förmigen Klemme

Setze in die linke Schraubbohrung eine der selbstschneidenden Schrauben und ziehe diese fest (s. Abb. 3). Wiederhole diesen Schritt mit der rechten Schraubbohrung – die Klemme für den Köcher sollte nun fest sitzen. Nimm den Köcher zur Hand und setze die Bohrungen des Köchers auf die Bohrung der noch freien Stelle an der langen, E-förmigen Klemme an (s. Abb. 4).



Abb. 3: Festschrauben der ersten Schraube

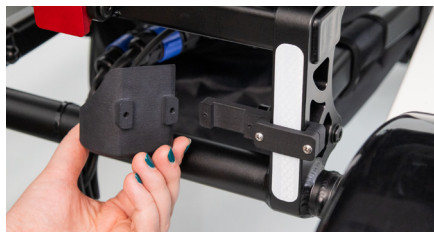


Abb. 4: Ansetzen des Köchers

Schraube den Köcher mit zwei selbstschneidenden Schrauben an und achte darauf, dass er fest sitzt (s. Abb. 5). Der Köcher ist nun fertig montiert (s. Abb. 6).



Abb. 5: Anschrauben des Köchers



Abb. 6: Fertig montierter Köcher

Lege nun die zwei Rohrklammerhälften an das Rückenlehnenrohr an. Achte darauf, dass die abgesenkte Schraubbohrung nach oben zeigt (s. Abb. 7). Setze die Klemmhalterung an die Rohrklammern und drücke die beiden Klammern leicht auseinander, um die Klemmhalterung zu befestigen (s. Abb. 8).



Abb. 7: Abgesenkte Schraubbohrung



Abb. 8: Ansetzen der Klemmhalterung

Positioniere daraufhin die Klemmhalterung durch Drehen waagrecht am Rückenlehnenrohr und drücke die Rohrklammern zusammen, um die Klemmhalterung zu fixieren (s. Abb. 9). Setze die letzte selbstschneidende Schraube in die abgesenkte Schraubbohrung und schraube die Klemmhalterung fest (s. Abb. 10).



Abb. 9: Fixieren der Klemmhalterung



Abb. 10: Festschrauben der Klemmhalterung

Achte darauf, dass der Köcher und die Klemmhalterung parallel übereinander zulaufen, damit Deine Gehhilfe einen festen Stand hat. Verschiebe die Rohrklemme entlang des Rückenlehnenrohrs für eine optimale Position.

Zuletzt ziehst Du den im Lieferumfang enthaltenen Klettstreifen durch die Klemmhalterung (s. Abb. 11). So ist Deine Gehhilfe zu jeder Zeit doppelt abgesichert (s. Abb. 12).



Abb. 11: Einführen des Klettstreifens



Abb. 12: Fertig montierte Klemmhalterung

Deine Notizen:

Avec le kit porte-canne, vous avez toujours votre aide à la marche à portée de main. Le support se fixe facilement sur le cadre de votre fauteuil roulant ergoflix.

Bon à savoir : Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme de taille 2.

Voici les étapes pour le montage :

Prenez la pince longue en forme de „E“ et passez-la derrière le réflecteur à travers le cadre du fauteuil (voir figure 1). Ensuite, placez par-dessus la pince plus courte en forme de „C“ (voir figure 2).



Figure 1 : Fixation sur la partie inférieure du cadre



Figure 2 : Positionnement de la pince plus courte en forme de „C“

Insérez l'une des vis auto-perceuses dans le trou de vissage gauche et serrez-la fermement (voir figure 3). Répétez cette étape avec le trou de vissage droit – la pince qui maintient le support doit maintenant être bien fixée.

Prenez le support et alignez ses trous avec celui de l'emplacement encore libre sur la pince longue en forme de „E“ (voir figure 4).



Figure 3 : Serrage de la première vis

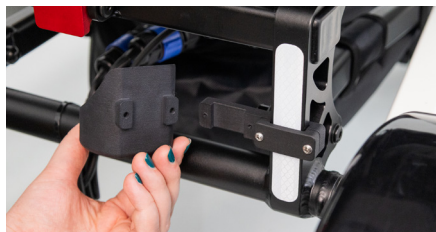


Figure 4 : Positionnement du support

Fixez le support à l'aide de deux vis auto-perceuses et assurez-vous qu'il soit bien stable (voir figure 5). Le support est maintenant entièrement monté (voir figure 6).



Figure 5 : Fixation du support avec les vis



Figure 6 : Support entièrement monté

Placez maintenant les deux moitiés du collier de serrage autour du tube du dossier. Veillez à ce que le trou de vissage encastré soit orienté vers le haut (voir figure 7). Positionnez le support de serrage sur les colliers et écartez-les légèrement pour le fixer (voir figure 8).



Figure 7 : Trou de vissage encastré



Figure 8 : Positionnement du support de serrage

Tournez ensuite le support de serrage pour le positionner à l'horizontale sur le tube du dossier. Appuyez sur les colliers pour fixer le support de serrage (voir figure 9). Insérez la dernière vis auto-perceuse dans le trou de vissage encastré et serrez-la fermement (voir figure 10).

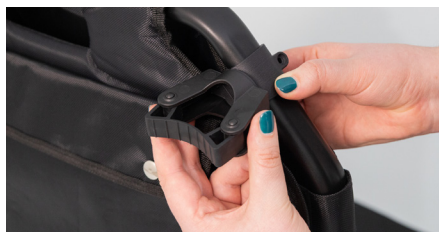


Figure 9 : Fixation du support de serrage



Figure 10 : Serrage du support de serrage

Assurez-vous que le support et le collier de serrage soient bien alignés l'un au-dessus de l'autre afin que votre canne soit bien stable.

Ajustez la position du collier le long du tube du dossier pour un positionnement optimal.

Enfin, passez la bande velcro fournie à travers le support de serrage (voir figure 11). Cela permet d'assurer une double fixation de votre aide à la marche à tout moment (voir figure 12).



Figure 11 : Passage de la bande velcro



Figure 12 : Support de serrage entièrement monté

Vos notes :

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachte: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Stand: Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Version: Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art.-Nr.: A00064



202607-30