

ergoflix

Montageanleitung

Schwenkarm für Bedienmodul

Guide de montage

Pantographe



Den Schwenkarm für Dein Bedienmodul kannst Du zur Seite bewegen und so näher an Tische oder Sanitäreinrichtungen heranfahren. Das ermöglicht Dir noch mehr Flexibilität.

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Und so geht's:

Entferne zunächst das vorhandene Bedienmodul, indem Du das silberne Rädchen am Kabel lockerst und die Stecker auseinanderziehst (s. Abb. 1). Löse die Feststellschraube, um das Bedienmodul aus der Armlehne zu entfernen (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Trennen des Kabels



Abbildung 2: Entfernen des Bedienmoduls

Löse an der Unterseite des Bedienmoduls die Sternmutter (s. Abb. 3), um das Bedienmodul von der Gabel zu trennen (s. Abb. 4) und bewahre diese auf, falls Du den Schwenkarm wieder demontierst.



Abbildung 3: Lösen der Sternmutter



Abbildung 4: Abtrennen der Gabel

Löse die Platte unterhalb des Bedienmoduls (s. Abb. 5) und entferne die Unterlegscheiben der beiden Schrauben (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Lösen der Schrauben



Abbildung 6: Entfernen der Unterlegscheiben

Schraube nun wieder die Platte mit beiden Schrauben fest und lege den Schwenkarm an die Platte an. Achte darauf, dass der Schraubenkopf passgenau in der größeren Bohrung liegt (s. Abb. 7). Verwende die beigelegte längere Feststellschraube und drehe diese auf die Schraube, um den Schwenkarm zu befestigen (s. Abb. 8).



Abbildung 7: Anlegen des Schwenkarms



Abbildung 8: Festdrehen der Feststellschraube

Führe nun den Schwenkarm wieder in die Armlehnenöffnung ein (s. Abb. 9). Drehe die Feststellschraube an der Armlehne fest, um den Schwenkarm zu fixieren (s. Abb. 10).



Abbildung 9: Einführen des Schwenkarms



Abbildung 10: Festdrehen der Feststellschraube

Um das Bedienmodul wieder anzuschließen, verbinde die beiden Stecker mit der Pfeilmarkierung zueinander und drehe anschließend das silberne Rädchen (s. Abb. 11). Der Schwenkarm wurde erfolgreich montiert (s. Abb. 12).



Abbildung 11: Verbinden des Kabels

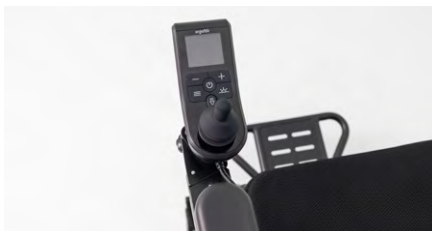


Abbildung 12: Fertig montierter Schwenkarm

Das Bedienmodul kann nun abgeschwenkt werden. Greife dazu das Bedienmodul und bewege es nach außen hinten (s. Abb. 13). Wenn der Schwenkarm seine Endposition erreicht hat (s. Abb. 14), kannst Du bequem an Objekte heranfahren.



Abbildung 13: Abschwenken des Bedienmoduls



Abbildung 14: Endposition des Schwenkarms

Kontrolliere vor jedem Fahrtantritt, ob die Schrauben am Schwenkarm noch fest angezogen sind. Sollte dies nicht so sein, müssen diese einmal nachgezogen werden.

Bitte beachte, dass beim Ab-Schwenken des Schwenkarms Quetschgefahr besteht!

Le pantographe vous permet de déplacer votre module de commande sur le côté, afin de vous rapprocher plus facilement des tables ou des installations sanitaires. Vous gagnez ainsi en flexibilité.

Bon à savoir : vous avez besoin d'un tournevis cruciforme pour le montage.

Et voici les étapes du montage :

Retirez d'abord le module de commande existant en desserrant la petite molette argentée sur le câble, puis en débranchant les connecteurs (voir fig. 1). Desserrez ensuite la vis de blocage pour retirer le module de commande de l'accoudoir (voir fig. 2).



Figure 1 : Déconnexion du câble



Figure 2 : Retrait du module de commande

Desserrez l'écrou étoilé situé sous le module de commande (voir fig. 3) afin de séparer le module de commande de la fourche (voir fig. 4). Conservez cet écrou au cas où vous démonteriez à nouveau le pantographe.



Figure 3 : Desserrage de l'écrou étoilé



Figure 4 : Séparation de la fourche

Desserrez la plaque située sous le module de commande (voir fig. 5) et retirez les rondelles des deux vis (voir fig. 6).



Figure 5 : Desserrage des vis



Figure 6 : Retrait des rondelles

Vissez à nouveau la plaque à l'aide des deux vis, puis positionnez le pantographe contre la plaque. Veillez à ce que la tête de vis s'ajuste parfaitement dans le trou le plus large (voir fig. 7). Utilisez l'écrou de blocage plus long fourni et vissez-le sur la vis, afin de fixer le pantographe (voir fig. 8).



Figure 7 : Positionnement du pantographe



Figure 8 : Serrage de l'écrou de blocage

Insérez à présent le pantographe dans l'ouverture de l'accoudoir (voir fig. 9). Serrez ensuite la vis de blocage située sur l'accoudoir afin de fixer le pantographe (voir fig. 10).



Figure 9 : Insertion du pantographe



Figure 10 : Serrage de la vis de blocage

Pour reconnecter le module de commande, reliez les deux connecteurs en alignant les flèches, puis serrez la petite molette argentée (voir fig. 11). Le pantographe est maintenant monté avec succès (voir fig. 12).



Figure 11 : Raccordement du câble

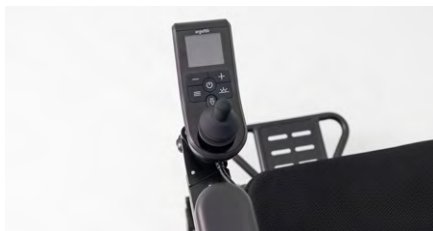


Figure 12 : Pantographe entièrement monté

Le module de commande peut désormais être pivoté. Pour cela, saisissez le module de commande et déplacez-le vers l'extérieur, vers l'arrière (voir fig. 13). Lorsque le pantographe atteint sa position finale (voir fig. 14), vous pouvez vous approcher aisément des objets.



Figure 13 : Pivotement du module de commande



Figure 14 : Position finale du pantographe

Avant chaque utilisation, vérifiez que les vis du pantographe sont toujours bien serrées. Si ce n'est pas le cas, resserrez-les.

Veillez noter qu'il existe un risque de pincement lors du pivotement du pantographe !

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Telefonische Servicezeiten
März bis November:
montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr
Dezember bis Februar:
montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00024HV1



202604-09