

ergoflīx

Montageanleitung

Rückspiegel mit Halter

Guide de montage

Rétroviseur avec support



Der Rückspiegel mit Halter ermöglicht Dir ein erweitertes Sichtfeld beim Fahren mit Deinem Elektrorollstuhl. Mit diesem Zubehör hast Du rückwärtig alles im Blick, ohne dass Du Dich umdrehen musst. Der Spiegel kann sowohl an der linken als auch an der rechten Seite Deines Wegbegleiters montiert werden. Beachte, dass das Bedienmodul und der Rückspiegel nicht an derselben Seite angebracht werden können.

Gut zu wissen: Für die Montage benötigst Du lediglich den mit dem Zubehör gelieferten Doppel-Maulschlüssel der Größe 14 mm und 15 mm sowie einen Inbusschlüssel der Größe 4, der dem Toolkit Deines ergoflix-Rollstuhls beiliegt.

Und so geht's:

Nimm den Rohradapter zur Hand und schraube ihn auf das Gewinde des Rückspiegels (s. Abb. 1). Platziere die Mutter und den Rohradapter durch Drehen so, dass beide sich im oberen Drittel des Gewindes befinden. Verschraube beide Teile noch nicht zu fest miteinander, um in den nächsten Schritten noch Einstellungen vornehmen zu können.



Abbildung 1: Rohradapter auf das Gewinde des Rückspiegels schrauben

Löse die Feststellschraube unter der Armlehne und entferne die schwarze runde Abdeckung (s. Abb. 2). Montiere den Rückspiegel an Deinem ergoflix-Rollstuhl, indem Du ihn in die Aufnahmeöffnung der Armlehne einführst (s. Abb. 3).



Abbildung 2: Entfernen der Abdeckung



Abbildung 3: Rückspiegel in die Aufnahmeöffnung der Armlehne einführen

Achte darauf, dass die Nut nach unten zeigt, damit die Schraube in der Armlehnenöffnung sicher greift.

Fixiere die Feststellschraube (s. Abb. 4). Du hast die Möglichkeit vier Einstellungen vorzunehmen: Positioniere den Spiegel so, dass du dein hinteres Umfeld im Blick hast und verschraube die Kontermutter mit dem Rohradapter mit Hilfe des Maulschlüssels Größe 15 fest miteinander. Durch Bewegen des Gelenks an der Innensechskantschraube passt Du den Winkel des Spiegels an (s. Abb. 5).

Des Weiteren kannst Du den Blickwinkel verfeinern, indem Du die Mutter, die sich oberhalb der Innensechskantschraube befindet, mit dem Maulschlüssel Größe 14 löst (s. Abb. 6). Bewege den Spiegel in Deine Wunschrichtung und drehe die Mutter fest, wenn Du die Position gefunden hast, die für Dich ideal geeignet ist.



Abbildung 4: Feststellschraube fixieren



Abbildung 5: Lösen und Verstellen am Gelenk der Innensechskantschraube



Abbildung 6: Mutter lösen, um individuelle Positionierung vorzunehmen

Mit Hilfe des Gelenks, das sich direkt unterhalb der Spiegelfläche befindet, kannst Du noch eine Feinjustierung vornehmen. Der Rückspiegel ist nun einsatzbereit.

Le rétroviseur avec support vous permet d'élargir votre champ de vision lors de la conduite de votre fauteuil roulant électrique. Grâce à cet accessoire, vous pouvez voir derrière vous, sans avoir à vous retourner. Le miroir peut être monté aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit de votre compagnon de route. Notez que le module de commande et le rétroviseur ne peuvent pas être installés du même côté.

Bon à savoir : Pour le montage, vous avez seulement besoin de la clé à fourche double de taille 14 et 15, fournie avec cet accessoire, ainsi que d'une clé Allen de taille 4, fournie dans le kit d'outils de votre fauteuil roulant ergoflix.

Voici les étapes pour le montage :

Prenez en main l'adaptateur tubulaire et vissez-le sur le filetage du rétroviseur (voir Fig. 1). Placez l'écrou et l'adaptateur tubulaire en les faisant tourner de manière à ce qu'ils se trouvent tous deux dans le tiers supérieur du filetage. Ne vissez pas trop fort les deux parties l'une à l'autre, afin de pouvoir encore effectuer des réglages dans les étapes suivantes.



Figure 1 : Vissage du tube sur le filetage du rétroviseur

Desserrez la vis de verrouillage sous l'accoudoir et retirez le couvercle rond noir (voir Fig. 2). Montez le rétroviseur sur votre fauteuil roulant ergoflix en l'insérant dans le tube de l'accoudoir (voir Fig. 3).



Figure 2 : retrait du capot



Figure 3 : Insertion du rétroviseur dans le tube de l'accoudoir

Assurez-vous que la rainure est orientée vers le bas afin que la vis de l'ouverture de l'accoudoir s'accroche solidement.

Fixez la vis de blocage (voir Fig. 4). Vous pouvez procéder à quatre réglages : positionnez le miroir de manière à ce que vous puissiez voir votre environnement arrière et vissez fermement le contre-écrou avec l'adaptateur tubulaire à l'aide de la clé plate de 15 (voir Fig. 5).

En outre, vous pouvez affiner l'angle de vue en desserrant l'écrou qui se trouve au-dessus de la vis à six pans creux à l'aide de la clé à fourche de 14. Déplacez le miroir dans la direction souhaitée et tournez fermement l'écrou lorsque vous avez trouvé la position idéale pour vous (voir Fig. 6).



Figure 4 : Fixage de la vis de blocage



Figure 5 : Desserrage et réglage du joint de la vis à six pans creux



Figure 6 : Dévissage de l'écrou pour effectuer un positionnement individuel

À l'aide du joint, qui se trouve directement sous la surface du miroir, vous pouvez effectuer un réglage fin. Le rétroviseur est maintenant prêt à l'emploi.





ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand 

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00036



202605-17