

Montageanleitung

Ausziehbare Fußstütze

Guide de montage

Repose-pieds monopalette ajustable



Mit der ausziehbaren Fußstütze kann Deine Sitzposition individuell auf Dich angepasst werden und unterstützt Dich bei einer gesunden Haltung.

Gut zu wissen: Du benötigst einen Inbusschlüssel der Größe 5 und einen Schraubenschlüssel in der Größe 13.

Und so geht's

Löse beide Schrauben (und die schwarzen Abdeckungen der Muttern, falls diese montiert sind) der bereits montierten Fußstütze mit dem Inbusschlüssel (s. Abb. 1) und einem Schraubenschlüssel.



Abb. 1: Lösen der Schraube



Abb. 2: Mutterabdeckung (falls montiert)

Halte beim Lösen der zweiten Schraube die Fußstütze fest und entferne diese (s. Abb. 3). Vor dem Montieren der ausziehbaren Fußstütze müssen die angebrachten Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben entfernt werden (s. Abb. 4).



Abb. 3: Entfernen der Schraube



Abb. 4: Lösen der Einzelteile

Führe zum Befestigen die Schrauben jeweils von der äußeren Seite und die Muttern mit Unterlegscheibe von der inneren Seite ein (s. Abb. 5). Verwende den Schraubenschlüssel, um beim Festdrehen gehalten zu können (s. Abb. 6).



Abb. 5: Einsetzen der Einzelteile



Abb. 6: Festziehen der Schraube

Nach dem Montieren kann die Fußstütze zum besseren Ausziehen hochgeklappt werden. Für die Längeneinstellung werden die Rastbolzen seitlich an der Stütze ausgezogen und die Fußstütze nach oben bewegt (s. Abb. 7 und 8).



Abb. 7: Ziehen der Rastbolzen



Abb. 8: Ausgezogene Fußstütze

Zum Einrasten werden die Rastbolzen losgelassen und die Fußstütze bewegt, bis ein Klicken ertönt. Die Fußstütze ist nun bereit und kann individuell angepasst werden (s. Abb. 9 und 10).



Abb. 9: Fertig montierte Fußstütze



Abb. 10: Unterschiedliche Längen

Hinweis: Die Fußstütze Nicholas ist eingeschränkt mit dem ergoflix® LX kompatibel. In der niedrigsten Einstellung dient sie ausschließlich dem Transport, da es bei der Nutzung in der untersten Stufe zu einer Kollision zwischen den Rädern und der Fußstütze kommen kann.

Grâce au repose-pieds monopalette ajustable, vous pouvez adapter votre position assise à vos besoins et bénéficier d'un soutien optimal pour maintenir une posture saine.

Bon à savoir : vous aurez besoin d'une clé Allen de taille 5 ainsi que d'une clé de 13 mm.

Et voici comment procéder

Desserrez les deux vis du repose-pieds monopalette ajustable déjà monté, ainsi que les capuchons noirs des écrous, s'ils sont présents, à l'aide de la clé Allen (voir fig. 1) et d'une clé plate.



Fig. 1 : Desserrage de la vis



Fig. 2 : Capuchon de l'écrou (si présent)

Lorsque vous desserrez la deuxième vis, maintenez le repose-pieds du fauteuil afin d'éviter qu'il ne tombe, puis retirez-le (voir fig. 3).

Avant de monter le repose-pieds monopalette ajustable, retirez les vis, les écrous et les rondelles déjà fixés (voir fig. 4).



Fig. 3 : Retrait de la vis



Fig. 4 : Retrait des éléments de fixation

Pour fixer l'ensemble, insérez les vis par l'extérieur et les écrous avec leurs rondelles par l'intérieur (voir fig. 5).

Utilisez la clé plate pour maintenir l'écrou pendant le serrage (voir fig. 6).



Fig. 5 : Mise en place des éléments de fixation



Fig. 6 : Serrage de la vis

Après le montage, vous pouvez relever le repose-pieds monopalette ajustable afin de faciliter son déploiement. Pour régler sa longueur, tirez sur les goupilles de verrouillage situées de chaque côté du repose-pieds, puis relevez celui-ci jusqu'à la position souhaitée (voir fig. 7 et 8).



Fig. 7 : Libération des goupilles de verrouillage



Fig. 8 : Réglage du repose-pieds ajustable

Il faut positionner le repose-pieds à la position voulue puis relâcher les doigts d'indexage. Attention assurez-vous du verrouillage de la palette jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le repose-pieds est maintenant prêt et sécurisé (voir Fig. 9 et 10).



Fig. 9 : Repose-pieds ajustable monté



Fig. 10 : Différentes longueurs de réglage

Remarque : le repose-pieds monopalette ajustable est compatible de manière limitée avec l'ergoflix LX. Dans le réglage le plus bas, il sert uniquement au transport. Lors de l'utilisation dans cette position, une collision entre les roues et le repose-pieds peut se produire.





ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand  **SUNRISE**
MEDICAL.

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00026



202607-11